

1. Før brug



Vask hænderne og sæt dig i en stol med lavt ryglæn. Skub øjendråbeflasken (med lukket låg) helt ned i dråbestøtten. Kontroller altid før brug, at flasken sidder fast i dråbestøtten.



Hold dråbestøtten i hånden og sørg for at spejlet i dråbestøtten vender nedad (se foto).

2. Placér flasken over øjet



Placér nederste del af dråbestøtten lige under øjet. Træk forsigtigt ned så der dannes en "lomme" mellem øjenlåget og øjet (se foto).



Placér den øverste del af dråbestøtten mod panden nær øjenbrynet. Se efter dit øje i dråbestøttens spejl. Det kan være lettere at se, hvis du holder dig for det andet øje. Dråbestøtten og flasken er nu placeret korrekt over øjet.

3. Korrekt placering af hovedet



Se igennem hullet i den øverste del af dråbestøtten. Læn hovedet bagover, så du kan se loftet over dig gennem hullet i dråbestøtten. Dit hoved er nu placeret korrekt. Klem forsigtigt på dråbestøtten med dine fingre.

Øjendråben skal ramme øjet. Hvis det andet øje skal behandles gentages processen. Skru låget på flasken. Flasken kan opbevares i dråbestøtten.

Vedrørende rengøring - se afsnittet "Råd om rengøring"

Universal Eyot® Øjendråbestøtte - Brugsvejledning



Universal Eyot Øjendråbestøtte, er et hjælpemiddel designet til dig, når du tager dine Alcon øjendråber.

Producent:
Multidee Vianen
PO Box 135, 4130 EC Vianen, Holland.

1030-0011-00 08.03.'07

Dansk distributør:
Alcon Danmark A/S
Rødovre Parkvej 25
2610 Rødovre

CE Eyot® er et registreret varemærke.
Patent sendt til godkendelse.

Universal Eyot® Øjendråbestøtte Eyot®

Læs brugsvejledningen grundigt før du anvender Universal Eyot® Øjendråbestøtte. Der er vigtigt, at du anvender dine øjendråber som anvist af lægen. Yderligere information om dine øjendråber findes i den indlægsseddel, der følger med øjendråberne.

Råd om rengøring

Lad flasken blive i dråbestøtten og aftør denne med en tør klud.
Hvis nødvendigt tages flasken ud og dråbestøtten skylles i lunkent vand og tørres med en ren klud.
Anvend ikke varmt eller kogende vand.
Dråbestøtten må ikke vaskes i opvaskemaskinen.

Anden information

Før du anvender dråbestøtten, skal du sikre dig, at flasken sidder godt fast.

Universal Eyot® Øjendråbestøtte kan bruges til alle 5 ml øjendråbeflasker fra Alcon.

Universal Eyot® Øjendråbestøtte er et enkelt hjælpemiddel til brug ved drypning af øjne. Øjendråbeflasken kan opbevares i dråbestøtten.

Universal Eyot® Øjendråbestøtte er fremstillet af recirkuleret, termoplastisk, syntetisk materiale. Spejlet er fremstillet af metallisk polyester

Vigtigt - Maximal højde

Når øjendråbeflasken sidder i dråbestøtten, må flaskespidsen ikke gå højere op end til den linje, der er præget ind i siden over spejlet.

Universal Eyot® Øjendråbestøtte er beregnet til 5 ml øjendråbeflasker fra Alcon.

For at undgå mulige skader er det vigtigt at sikre, at flasken er skubbet helt ned i dråbestøtten.