

1. Voorbereiding



Was uw handen.
Ga zitten in stoel met lage rugleuning.
Duw het gesloten flesje tot aanslag stevig in hulpstuk.
Controleer vóór elk gebruik of flesje tot aanslag in hulpstuk zit.



Draai dopje los.
Neem hulpstuk in uw hand.
Als u kijkt zit het spiegelkje beneden het flesje.
(zie foto)

2. Flesje voor uw oog zetten



Plaats hulpstuk onder uw onderste ooglid en trek ooglid naar beneden toe verder open.



Laat nu de bovenkant van het hulpstuk nabij uw wenkbrauw, op uw voorhoofd rusten.
U ziet in het spiegelkje uw oog.
Hulpstuk en flesje zijn in de juiste positie.

3. Hoofd achterover brengen



Kijk nu door kijkgat.
Breng uw hoofd helemaal achterover totdat u plafond **loodrecht** boven u ziet.
Uw hoofd is nu in juiste positie.

Knijp met uw vingers voorzichtig in hulpstuk.
De oogdruppel valt in uw oog.
Schroef flesje weer dicht.
Laat flesje in hulpstuk zitten.

Voor reinigingsadvies z.o.z.

Accesoire (optioneel)



Druk de brede zijde van de **Eyot**® Bottle Opener over het dopje van het flesje, en draai het dopje los.

Let er goed op dat het flesje tot aan de aanslag in het hulpstuk blijft.
U kunt de **Eyot**® Bottle Opener op het dopje laten.

Gebruiksaanwijzing Azopt®Eyot®



Azopt®Eyot®

Voor optimale toediening van uw oogdruppels.

Uw oogarts heeft u dit hulpstuk meegegeven om nog beter te kunnen druppelen.

Fabrikant:

Multidee Vianen
Postbus 135, 4130 EC Vianen, Nederland

Distributeur:

Alcon Nederland BV
Postbus 3061, 4200 EB Gorinchem



Azopt® is a registered trade name.
Eyot® is a registered trade name.
Patents pending.

Azopt®Eyot®

Leest u voordat u het Azopt®Eyot® hulpstuk gebruikt deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

De gebruikelijke dosering van Azopt® is tweemaal daags één druppel. Zie ook de bijsluiter van Azopt® oogdruppels.

Reinigingsadvies

Droog reinigen:

Laat het flesje in hulpstuk zitten en reinig hulpstuk met een schone droge doek.

Nat reinigen:

Verwijder flesje. Spoel hulpstuk met lauw water af. Droog het met een schone doek. Gebruik geen heet of kokend water. Het hulpstuk niet in vaatwasser reinigen.

Overige Informatie

Controleer voor gebruik of het flesje goed geplaatst is tot aan de aanslag.

Azopt®Eyot® is een oogdruppelhulpstuk dat uitsluitend in combinatie met Azopt® oogdruppels mag worden gebruikt. Dit hulpstuk voorziet uitsluitend in een andere druppeltechniek. Lees de Azopt® bijsluiter voor verdere informatie.

U kunt het Azopt® flesje in de Azopt®Eyot® laten zitten.

Azopt®Eyot® is gemaakt van recyclebaar thermoplastisch kunststof.

De spiegel is van gemetalliseerd polyester.

Waarschuwing



Max. hoogte

De bovenkant van het flesje mag niet boven het ingegoten lijntje uitsteken.

Dit hulpstuk alleen gebruiken in combinatie met Azopt® 5 ml flesje van Alcon Laboratories.

Druk het flesje tot aan de aanslag in het hulpstuk om mogelijke kwetsuren te voorkomen.

In geval u de Eyot® Bottle Opener gebruikt om het dopje van het flesje af te draaien let u er dan op dat u het dopje van het flesje volledig los draait en daarna het dopje van het flesje afneemt. Voorkom dat u het flesje onbedoeld omhoog trekt.