

Förberedelser



Tvätta dina händer.

Sitt i en stol med ett lågt ryggstöd.

Tryck ner den stängda flaskan (med botten neråt) i droppstödet tills den sitter fast ordentligt.

Skruva av flaskans lock (använd eventuellt **Eyot**[®] flasköppnare).



Kontrollera före varje användningstillfälle att flaskan sitter ordentligt i droppstödet.

Håll droppstödet i din hand.

Du ska hålla droppstödet så att spegeln befinner sig i nederkanten (se bilden).

Att placera flaskan framför ditt öga



Placera den nedre delen av droppstödet alldeles nedanför ditt undre ögonlock och dra försiktigt ögonlocket nedåt tills en "ficka" bildas mellan ögonlocket och ditt öga (se bild).



Placera den övre delen av droppstödet mot pannan nära ditt ögonbryn.

Sök efter bilden av ditt öga i **Eyot**[®]'s spegel. Det kan vara lättare om du stänger eller täcker över ditt andra öga.

Droppstödet och flaskan är nu korrekt placerade.

Att placera huvudet korrekt



Titta nu upp genom hålet i övre delen av droppstödet.

Luta huvudet bakåt tills du kan se taket direkt ovanför dig genom hålet.




Nu är ditt huvud korrekt placerat.


Tryck ihop droppstödet noggrant med dina fingrar. Droppen ska nu falla direkt ner i ögat.

Du ska upprepa processen med ditt andra öga om din läkare föreskrivit det.

Stäng flaskan med locket. Flaskan kan sitta kvar i droppstödet.

Se nästa sida för rengöringsinstruktioner.

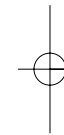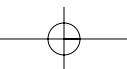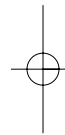

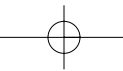

Azopt®Eyot®

Läs de här instruktionerna noga innan du använder Azopt®Eyot® droppstöd

Det är viktigt att du använder ditt läkemedel regelbundet så som din läkare föreskrivit. Ytterligare upplysningar om användningen av Azopt® finner du i bipacksedeln som finns i varje förpackning av Azopt®.

Ytterligare upplysningar

Kontrollera före varje användning att flaskan sitter ordentligt i droppstödet.


Azopt®Eyot® ska bara användas tillsammans med Azopt® ögondroppar. Droppstödet erbjuder en enkel alternativ tillförselteknik. Läs bipacksedeln för Azopt® för ytterligare upplysningar.

Råd om rengöring

Se till att flaskans topp ligger under markeringen på stödets insida.

Lämna flaskan i droppstödet och torka av droppstödet med en ren torr trasa.

Om nödvändigt kan man ta bort flaskan och tvätta droppstödet med ljummet vatten. Torka det torrt med en ren trasa. Använd inte varmt eller kokande vatten. Rengör inte droppstödet i diskmaskin.

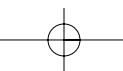



Läs bipacksedeln för Azopt®, som följer med varje Azopt®-flaska.

Du kan låta Azopt®-flaskan sitta kvar i Azopt®Eyot®.

Azopt®Eyot® är tillverkad av återvinningsbart syntetisk termoplast. Spegeln är gjord av metallisk polyester.

Tillverkare:
Multidee Vianen
PO Box 135, 4130 EC Vianen, the Netherlands.

Distributör:
Alcon Sverige AB
Box 12233
102 26 Stockholm.

 Azopt® är ett registrerat varumärke.
 Eyot® är ett registrerat varumärke.
Patentsökt.

Bruksanvisning för Azopt®Eyot®



Ett smidigt sätt att tillföra ögondroppar på.

Din ögonläkare har givit dig det här droppstödet för användning med Azopt® ögondroppar.

