

Stap 1

Was uw handen en ga zitten in een stoel met een niet te hoge rugleuning.


Lees deze bijsluiter helemaal.

Draai het dopje van het flesje los.



Stap 2

Schuif het flesje in de Eyot®.
Druppelaar moet helemaal door de Eyot® steken.

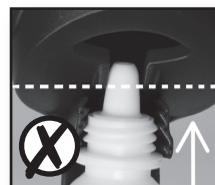

Stap 3

Plaats de Eyot® onder uw ooglid en trek het ooglid voorzichtig naar beneden toe open totdat de Eyot® op uw jukbeen steunt.



Stap 4

Kantel de Eyot® op Uw wenkbrauw.

De druppelaar van het flesje bevindt zich recht voor uw oog.



Stap 5

Ga met uw hoofd achterover en kijk door de opening totdat u het plafond **loodrecht** boven u ziet.

Druppel Uw oog door in het flesje te knijpen.

Neem het flesje uit de Eyot® en sluit deze af.



Gebruikersinstructie

Hulpstuk bij het
druppelen van uw ogen.



Fabrikant:

Multidee Inventors
Postbus 135, 4130 EC Vianen, Nederland

artikelnummer: 1010-0018-01 150306

Distributeur:

Allergan BV
Edisonbaan 14 C-2, 3439 MN Nieuwegein, Nederland



Eyot® is a registered trade name.
Patents pending.

Overige product informatie

Eyot® is een universeel oogdruppelhulpstuk dat uitsluitend in combinatie met volledige indrukbare plastic oogdruppelflesjes gebruikt kan worden.

Oogdruppelflesjes van glas of van harde/stijve plastics niet in combinatie met de Eyot® gebruiken.

Gebruik alleen oogdruppelflesjes waarvan de lengte van de druppelaar tussen 8 en 14 millimeter is.

Eyot® voorziet uitsluitend in een andere druppeltechniek.

Eyot® is gemaakt van een recyclebare thermoplastische kunststof.

Eyot® voldoet aan de EC richtlijn 93/42 voor Medical Devices Class 1.

Reinigen

Na gebruik de Eyot® meteen reinigen met koud water en droog deppen met schone doek, stofvrij bewaren. Kook de Eyot® niet uit, niet in de vaatwasser, gebruik het niet voor andere doeleinden en houdt het voor eigen gebruik.

