

PREPARACION



Lave sus manos y sientese en una silla con un respaldo bajo.

Meta la ampolla en el UD **Eyot**[®].



Fijela bien.



Rompa la cabeza plana de la ampolla dandole vueltas.



Coga el UD **Eyot**[®] en su mano de forma que la mirilla este encima de la ampolla.

PONER EL BOTELLIN DELANTE DE SU OJO



Ponga el UD **Eyot**[®] debajo de su parpado bajo y tire el parpado suavemente hacia abajo.



Incline la parte alta del UD **Eyot**[®] hacia su frente. Usted podra ver el joteador como una manchita blanca delante de su ojo.

TUMBAR LA CABEZA



Mire por el mirador y incline su cabeza hacia atras hasta que pueda ver el techo directamente encima de usted (si no lo hace. de esta manera las gotas no caeran en su ojo).

Pellizque con sus dedos en la ampolla para gotear. Deje la ampolla fijada en el UD **Eyot**[®] y cierre la ampolla con la cabeza plana. Cambie la ampolla diariamente.

Lea tambien el prospecto de la ampolla.

LIMPIAR

Limpie el UD **Eyot**[®] diariamente al reemplazar la ampolla.

Enjuagelo con agua templada y sequelo con un trapo limpio.

No lo desinfecte con agua hierbiendo ni meterlo en lavavajilla.

DEMÁS INFORMACION

El UD **Eyot**[®] es solamente adecuado para el tipo de ampollas de Celluvisc y Tears plus Unit Dose de Allergan. UD **Eyot**[®] que estén dañados inmediatamente tirarlos.

El UD **Eyot**[®] proviene solamente en otro método de gotear sus ojos. Lea siempre el prospecto de Celluvisc y Tears Plus Unit Dose antes de usar el UD **Eyot**[®].

El UD **Eyot**[®] es fabricado de un material sintético termoplástico fácil de reciclar.

Fabricante: Multidee Vianen 1090-0003-00
Apartado de correo 135
4130 EC Vianen
Países Bajos

Distribuidor: Allergan Pharmaceutical Division Spain
Avenida de la Industria # 24
28760 Tres Cantos
Spain

Celluvisc y Tears Plus Unit Dose son marcas registradas.
Eyot es una marca registrada.
Patentes han sido otorgadas y pendientes.



USO DE EMPLEO DEL UD EYOT[®]



Un suplemento para facilitar el goteo de sus ojos con ampollas del tipo Unit Dose de Allergan.

Lea este prospecto antes del uso.