

## VOORBEREIDING



Was Uw handen en ga zitten in stoel met lage rugleuning.

Steek de ampul in de UD **Eyot**<sup>®</sup>.



Klik het vast.

## FLESJE VOOR UW OOG ZETTEN



Breek het platte topje van de ampul af door het er af te draaien.



Houd de UD **Eyot**<sup>®</sup> zo in uw hand dat het kijkgat boven het ampul zit.



Plaats de UD **Eyot**<sup>®</sup> onder uw onderste ooglid en trek het ooglid naar beneden toe zachtjes open.



Kantel de bovenkant van de UD **Eyot**<sup>®</sup> op uw voorhoofd. U ziet de druppelaar als een wit vlekje recht voor Uw oog.

## HOOFD ACHTEROVER BRENGEN



Kijk door het kijkgat en buig uw hoofd achterover totdat u het plafond loodrecht boven u ziet (anders valt de druppel niet in uw oog).

Knijp nu met uw vingers in de ampul om te druppelen. Laat de ampul in de UD **Eyot**<sup>®</sup> zitten en plaats het topje op de ampul. Vervang ampul dagelijks.

Lees ook de bijsluiter van de ampul.

## REINIGEN

Reinig de UD **Eyot**<sup>®</sup> dagelijks bij het vervangen van de ampul.

Spoel het met lauw water af en droog het met een schone doek.

Niet uitkoken en niet in vaatwasmachine reinigen.

## OVERIGE INFORMATIE

De UD **Eyot**<sup>®</sup> is uitsluitend geschikt voor de ampullen Celluvisc<sup>®</sup> en Tears Plus<sup>®</sup> Unit Dose van Allergan.

Beschadigde UD **Eyot**<sup>®</sup> onmiddellijk weggooien.

De UD **Eyot**<sup>®</sup> voorziet uitsluitend in een andere techniek om uw ogen te druppelen.

Lees altijd de bijsluiters van Celluvisc<sup>®</sup> en Tears Plus<sup>®</sup> Unit Dose oogdruppels vóórdat u de UD **Eyot**<sup>®</sup> gebruikt.

De UD **Eyot**<sup>®</sup> is van een recyclebare thermoplastische kunststof gemaakt.

**Fabrikant:** Multidee Vianen 1090-0004-00  
Postbus 135

4130 EC Vianen

**Distributeur:** Allergan B.V.  
Edisonbaan 14 C-2  
3439 MN Nieuwegein  
The Netherlands

Celluvisc<sup>®</sup> en Tears Plus<sup>®</sup> Unit Dose zijn geregistreeerde merknamen.  
**Eyot**<sup>®</sup> is een geregistreeerde merknaam.

Patenten verleend en hangende.



## GEBRUIKSAANWIJZING UD EYOT<sup>®</sup>



Een hulpstuk om gemakkelijk met Unit Dose ampullen van Allergan te kunnen druppelen.

Lees deze bijsluiter vóór gebruik.