

1. Vorbereitung



Halten Sie die verschlossene Travatan®-Flasche am Verschluss und stecken Sie diese in die Anwendungshilfe bis sie einrastet.



Öffnen Sie den Verschluss der Travatan®-Flasche und halten Sie die Anwendungshilfe so, dass sich der Spiegel im unteren Teil befindet.

2. Flasche für Augen positionieren



Ziehen Sie das Unterlid mit der Anwendungshilfe nach unten.



Sobald Sie Ihr Auge im Spiegel sehen, legen Sie den oberen Teil der Anwendungshilfe auf Ihre Augenbraue.

3. Kopf positionieren



Neigen Sie den Kopf nach hinten, schauen Sie nicht mehr in den Spiegel sondern nur noch durch das Loch der Anwendungshilfe bis Sie die Decke ganz recht oben Sie sehen.

Drücken Sie einmal mit Zeigefinger, Mittelfinger sowie dem Daumen auf die Anwendungshilfe und geben Sie 1 Tropfen Travatan® in Ihr Auge.

Hilfsmittel (optional)



Drücken Sie die schmale Seite des Eyot® Öffners auf die Verschlusskappe der Flasche und drehen Sie die Kappe ab.

Achten Sie darauf, dass die Flasche fest in der Anwendungshilfe bleibt.

Bis zum Wiederverschließen der Flasche nach dem Tropfen können Sie die Verschlusskappe im Eyot® Öffner lassen.

Gebrauchsanweisung Travatan® Eyot®

Hersteller:

10.20-0023-00 19.08.05

Multidee Vianen

PO Box 135, 4130 EC Vianen (die Niederlande)



Eyot® ist ein registriertes Warenzeichen.

Vertrieb für Belgium:

n.v. Alcon-Couvreur s.a.

Rijksweg 14, 2870 Puurs, Belgium



Verschliessen Sie die Travatan®-Flasche und belasten Sie diese nach der Applikation in der Anwendungshilfe.

Reinigung Eyot®

Reinigen Sie die Anwendungshilfe mit einem sauberen Tuch.

Wenn Sie die Anwendungshilfe mit warmen Wasser reinigen möchten, entfernen Sie bitte die Travatan®-Flasche vorher. Trocknen Sie die Anwendungshilfe sorgfältig.

Vor dem nächsten Gebrauch überprüfen Sie, dass die Travatan®-Flasche gut in der Anwendungshilfe verankert ist.

Gebrauchsanleitung

Travatan®-Eyot® ist eine Hilfe zur Anwendung von Travatan®-Augentropfen. Für weitere Informationen zu Ihren Augentropfen lesen Sie bitte die Patienteninformation für Travatan®. Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig durch und beachten Sie die Fotos.

Achtung



Diese Anwendungshilfe ist nur für den Gebrauch mit der 2,5ml Travatan®-Flasche von Alcon Pharma bestimmt.

Um Verletzungen beim Tropfen zu vermeiden, drücken Sie die Flasche bitte fest in die Anwendungshilfe.

Wenn Sie den Eyot® Öffner zum Abdrehen der Travatan®-Verschlusskappe benutzen, stellen Sie bitte sicher, dass die Flasche in der Anwendungshilfe fest an ihrem Platz bleibt. Nehmen Sie die Verschlusskappe erst ab, wenn diese komplett abgedreht ist.