

## 1. Vorbereitung



Waschen Sie sich Ihre Hände und setzen Sie sich in einen Stuhl mit einer niedrigen Rückenlehne. Halten Sie die verschlossene Travatan®-Flasche am Verschluss und stecken Sie diese in die Eintropfhilfe bis sie einrastet.




Öffnen Sie den Verschluss der Travatan®-Flasche und halten Sie die Eintropfhilfe so, dass sich der Spiegel im unteren Teil befindet.

## 2. Wie Sie die Eintropfhilfe richtig ansetzen



Ziehen Sie das Unterlid mit der Eintropfhilfe nach unten.

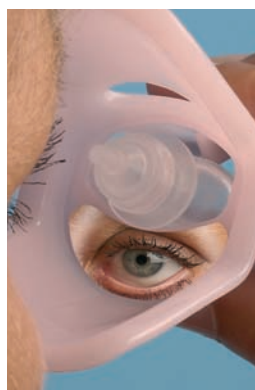

Sobald Sie Ihr Auge im Spiegel sehen, setzen Sie den oberen Teil der Eintropfhilfe im Bereich Ihrer Augenbraue an. Dabei kann es Ihnen helfen, wenn Sie Ihr anderes Auge schließen.

## 3. Die korrekte Kopfhaltung beim Eintropfen



Neigen Sie den Kopf nach hinten, schauen Sie nicht mehr in den Spiegel sondern nur noch durch das Loch der Eintropfhilfe bis Sie die Decke direkt über sich sehen. Drücken Sie einmal mit Zeige- und Mittelfinger sowie dem

Daumen auf die Eintropfhilfe und geben Sie 1 Tropfen Travatan® in Ihr Auge. Wenn Sie Travatan® an beiden Augen anwenden sollen, wiederholen Sie den gesamten Vorgang mit dem anderen Auge. Verschließen Sie anschließend die Flasche wieder mit dem Deckel. Die Flasche kann in der Tropfhilfe verbleiben. Bitte beachten Sie die Reinigungshinweise auf der Rückseite.

## Zubehör (optional)



Drücken Sie das schmale Ende des Eyot® Flaschenöffners auf den Deckel der Flasche und drehen Sie den Deckel herunter. Achten Sie darauf, dass die Flasche weiterhin richtig

in der Eintropfhilfe steckt. Sie können den Eyot® Flaschenöffner auf dem Deckel der Flasche lassen.

## Gebrauchsanweisung Travatan® Eyot®




Sie haben von Ihrem Augenarzt diese Eintropfhilfe erhalten, um Ihnen die Anwendung Ihrer Travatan® Augentropfen zu vereinfachen.

### Hersteller:

Multidee Vianen  
PO Box 135, 4130 EC Vianen (die Niederlande)

10.20-0054-00 18.10.07

 Eyot® ist ein registriertes Warenzeichen.

### Vertrieb für Deutschland

Alcon Pharma GmbH  
Blankreutestrasse 1  
79108 Freiburg

## Travatan® Eyot®

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie die Eintropfhilfe verwenden. Es ist wichtig, dass Sie Ihre Augentropfen regelmäßig anwenden, so wie von Ihrem Augenarzt verordnet. Sie können die Flasche während des vierwöchigen Anwendungszeitraums in der Eintropfhilfe belassen.

Travatan® Eyot® ist aus recyclefähigem thermoplastischem Kunststoff hergestellt. Der Spiegel besteht aus beschichtetem Polyester.

Für weitere Informationen zu Ihren Augentropfen lesen Sie bitte die Packungsbeilage von Travatan®.

## Reinigungshinweise

Reinigen Sie die Eintropfhilfe mit einem sauberen Tuch. Wenn Sie die Eintropfhilfe mit warmem Wasser reinigen möchten, entfernen Sie bitte die Travatan®-Flasche vorher. Trocknen Sie die Eintropfhilfe sorgfältig. Verwenden Sie kein heißes oder kochendes Wasser. Die Eintropfhilfe darf nicht in der Spülmaschine gewaschen werden.

## Warnhinweise



Die Eyot®-Eintropfhilfe ist nur für den Gebrauch mit Travatan® Augentropfen vorgesehen.

Um eventuelle Verletzungen zu vermeiden, versichern Sie sich bitte vor dem Gebrauch, dass die Travatan®-Flasche gut in der Eintropfhilfe verankert ist.

Drehen Sie die Verschlusskappe der Flasche komplett auf, bevor Sie die Kappe mit dem Eyot®-Flaschenöffner abziehen. Achten Sie darauf, dass die Flasche auch nach dem Öffnen noch richtig in der Eintropfhilfe steckt.