

1. Preparación



Lávese las manos.

Siéntese en una silla de respaldo bajo.

Introduzca la base del frasco en el dispositivo y empuje el frasco cerrado hacia abajo hasta que quede bien fijo.

Desenrosque el tapón.



Antes de cada uso, compruebe que el frasco esté bien colocado en el dispositivo.

Tome el dispositivo con la mano.

Sujete el dispositivo de manera que el espejo esté en la parte inferior (véase foto).

2. Colocación del frasco frente al ojo



Coloque la parte inferior del dispositivo justo debajo del párpado inferior y estire el párpado suavemente hacia abajo hasta que se forme una "bolsa" entre el párpado y el ojo (véase foto).



Coloque la parte superior del dispositivo cerca de la ceja, contra la frente.

Localice el ojo en el espejo de **Eyot**[®]. Puede que le resulte más fácil si cierra/se tapa el otro ojo.

El dispositivo y el frasco están ahora en la posición correcta.

3. Colocación correcta de la cabeza



Mire hacia arriba a través del agujero de la parte superior del dispositivo.

Incline la cabeza hacia atrás hasta que pueda ver el techo directamente encima suyo, a través del agujero.

La cabeza está ahora en la posición correcta.

Apriete cuidadosamente el dispositivo con los dedos. La gota de colirio caerá directamente en el ojo.

Repita el proceso con el otro ojo, según las instrucciones de su médico.

Cierre de nuevo el frasco con el tapón. Puede mantener el frasco en el dispositivo.

Véanse al dorso instrucciones para la limpieza.

Instrucciones de uso del dispositivo Eyot®



Su oftalmólogo le ha proporcionado este dispositivo para que le sea más fácil usar su colirio.


Fabricante:

Multidee Vianen
PO Box 135, 4130 EC Vianen (Holanda)

1020-0003-01 230605

Distribuidor:

Alcon
Camil Fabra, 58
08320 El Masnou, Barcelona
España

 **Eyot®** es marca registrada.
Pendiente de patentes.

Dispositivo Eyot®

Lea cuidadosamente estas instrucciones antes de usar el dispositivo Eyot®.

Es importante que use el medicamento regularmente en la forma recomendada por su médico.

Hallará más información sobre el uso del colirio en el prospecto incluido en cada envase del colirio.

Instrucciones para la limpieza

Sin sacar el frasco del dispositivo, limpie el dispositivo con un paño limpio y seco.

Si es necesario, retire el frasco y enjuague el dispositivo con agua tibia. Séquelo con un paño limpio. No use agua caliente ni en ebullición. No introduzca el dispositivo en el lavavajillas.

Más información

Controle:

Antes de cada uso, compruebe que el frasco esté bien colocado en el dispositivo.

Este dispositivo ofrece una técnica de aplicación simple y alternativa.

Puede mantener el frasco del colirio en el dispositivo **Eyot®**.

El dispositivo **Eyot®** está fabricado con material sintético termoplástico reciclable. El espejo está fabricado con un poliéster metalizado.