

1. Käyttö



Pese kätesi.

Istu tuolille, jossa on matala selkänoja.

Työnnä suljettu lääkepullo pohja edellä apulaitteeseen niin että se on kunnolla paikoillaan.

Avaa pullon korkki.




Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että pullo on kunnolla paikoillaan laitteessa.

Ota laite käteesi niin, että peili jää alapuolelle (katso kuva).

2. Pullon asettaminen silmän eteen



Aseta laitteen alempi osa aivan alaluomesi alle ja työnnä luomea kevyesti alaspäin, kunnes luomen ja silmän väliin muodostuu "tasku" (katso kuva).

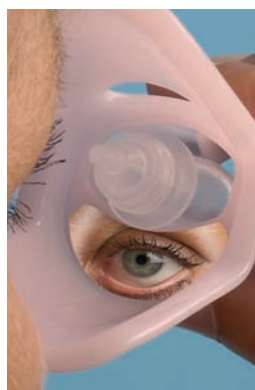

Aseta laitteen ylempi osa lähelle kulmakarvoja otsaa vasten.

Katso silmäsi laitteen peilistä. Tämä voi onnistua parhaiten sulkemalla/peittämällä toinen silmäsi.

Laite ja pullo ovat nyt oikeassa asennossa.

3. Pään asettaminen oikeaan asentoon



Katso laitteen yläosassa olevan aukon läpi.

Taivuta päätäsi taaksepäin kunnes näet aukosta katon suoraan yläpuolellasi.

Pääsi on nyt oikeassa asennossa.

Purista laitetta varovasti sormillasi. Silmätipan tulisi pudota suoraan silmäsi.

Toista vaiheet myös toisessa silmässä, jos lääkärisi on niin määrännyt.

Sulje pullon korkki. Voit säilyttää pulloa laitteessa.

Laitteen puhdistusohjeet kääntöpuolella.

Korkinavausapu



Työnnä Eyot -korkinavausavun pienempi pää pullon korkin päälle ja kierrä korkki auki.

Tarkista, että pullo on kunnolla paikoillaan annosteluapulaitteessa.

Voit jättää Eyot -korkinavausavun pullon korkin päälle.

Travatan®Eyot® käyttöohjeet



Olet saanut silmälääkäriltäsi tämän apuvälineen, joka helpottaa Travatan® tai DuoTrav™ silmätippojen annostelua silmään.

Valmistaja:

Multidee Vianen
PO Box 135, 4130 EC Vianen, Hollanti.

1020-0036-00 08-03-'07

Jakelija:

Alcon Finland Oy
PL 13 01641 Vantaa.



Travatan® on rekisteröity tavaramerkki.

Eyot® on rekisteröity tavaramerkki.
Patentihakemukset vireillä.

Travatan®Eyot®

Lue ohjeet huolellisesti ennen Travatan®Eyot®-laitteen käyttöä.

On tärkeää käyttää silmätippoja säännöllisesti lääkärin ohjeen mukaan.

Lisätietoa Travatan®-silmatippojen käytöstä löydät Travatan®-pakkauksen tuoteselosteesta.

Lisätietoa

Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että pullo on kunnolla paikoillaan laitteessa.

Travatan®Eyot®-laitetta tulee käyttää ainoastaan Travatan® tai DuoTrav™ silmätippojen kanssa. Laite tarjoaa vaihtoehtoisen tavan annostella silmätippoja. Lisätietojen saamiseksi tutustu Travatan® tai DuoTrav™ silmätippojen pakkausselosteeseen.

Laitteen puhdistaminen

Jätä pullo paikoilleen ja pyyhi laite puhtaalla ja kuivalla liinalla.

Jos tarpeen, poista pullo ja huuhtelee laite haalealla vedellä. Kuivaa se puhtaalla liinalla. Älä käytä kuumaa tai kiehuvaa vettä. Älä pese laitetta astianpesukoneessa.

Voit säilyttää Travatan®-pulloa Travatan®Eyot®-laitteessa.

Travatan®Eyot® on valmistettu kierrätyskelppoisesta termoplastisesta keinomateriaalista. Peili on metallisoitua polyesteriä.

Warning



Tätä apuvälinettä voi käyttää ainoastaan Alconin Travatan® 2,5 ml- tai DuoTrav™ 2,5 ml-pullon kanssa.

Vahingon välttääksesi varmista, että pullo on kunnolla paikoillaan laitteessa.

Jos käytät myös Eyot-korkinavausapua, varmista, että pullo on siinä hyvin paikoillaan.

Älä vedä pullon korkkia pois ennen kuin se on kierretty täysin auki