

## 1. Voorbereiding



Was uw handen.  
Ga zitten in een stoel met een lage rugleuning.  
Duw het gesloten flesje tot de aanslag stevig in het hulpstuk.  
Controleer vóór elk gebruik of het flesje tot de aanslag in het hulpstuk zit.



Draai het dopje los.  
Neem het hulpstuk in uw hand.  
Als u kijkt zit het spiegelkje beneden het flesje. (zie foto)

## 2. Flesje voor uw oog zetten



Plaats het hulpstuk onder uw onderste ooglid en trek het ooglid naar beneden toe verder open.



Laat nu de bovenkant van het hulpstuk nabij uw wenkbrauw, op uw voorhoofd rusten.  
U ziet in het spiegelkje uw oog.  
Hulpstuk en flesje zijn in de juiste positie.

## 3. Hoofd achterover brengen



Kijk nu door het kijkgat.  
Bring uw hoofd achterover totdat u het plafond **loodrecht** boven u ziet.  
Uw hoofd is nu in juiste positie.

Knijp met uw vingers voorzichtig aan het uiteinde van het hulpstuk. De oogdruppel valt in uw oog.  
Schroef het flesje weer dicht.  
Laat het flesje in het hulpstuk zitten.

Voor reinigingsadvies z.o.z.

## Accesoire (optioneel)



Druk de smalle zijde van de **Eyot®** Bottle Opener over het dopje van het flesje, en draai het dopje los.

Let er goed op dat het flesje tot aan de aanslag in het hulpstuk blijft.

U kunt de **Eyot®** Bottle Opener op het dopje laten.



Travatan®Eyot®

### **Voor optimale toediening van uw oogdruppels.**

Uw oogarts heeft u dit hulpstuk meegegeven om nog beter te kunnen druppelen.

#### **Fabrikant:**

Multidee Vianen  
Postbus 135, 4130 EC Vianen, Nederland

#### **Distributeur:**

Alcon Nederland BV  
Avelingen West 5, 4202 MS Gorinchem



Travatan® is a registered trade name.  
Eyot® is a registered trade name.  
Patents pending.

## Travatan®Eyot®

Leest u voordat u het Travatan®Eyot® hulpstuk gebruikt deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

De gebruikelijke dosering van Travatan® is éénmaal daags één druppel. Zie ook de bijsluiter van Travatan® oogdruppels.

## Reinigingsadvies

### **Droog reinigen:**

Laat het flesje in het hulpstuk zitten en reinig het hulpstuk met een schone droge doek.

### **Nat reinigen:**

Verwijder het flesje. Spoel het hulpstuk met lauw water af. Droog het met een schone doek. Gebruik geen heet of kokend water. Het hulpstuk niet in vaatwasser reinigen.

## Overige Informatie

Controleer voor gebruik of het flesje goed geplaatst is tot aan de aanslag.

Travatan®Eyot® is een oogdruppelhulpstuk dat uitsluitend in combinatie met Travatan® oogdruppels mag worden gebruikt. Dit hulpstuk voorziet uitsluitend in een andere druppeltechniek. Lees de Travatan® bijsluiter voor verdere informatie.

U kunt het Travatan® flesje in de Travatan®Eyot® laten zitten.

Travatan®Eyot® is gemaakt van recyclebaar thermoplastisch kunststof. De spiegel is van gemetalliseerd polyester.

## Waarschuwing



Dit hulpstuk alleen gebruiken in combinatie met Travatan® 2,5 ml flesje van Alcon Laboratories.

Druk het flesje tot aan de aanslag in het hulpstuk om mogelijke kwetsuren te voorkomen.

In geval u de Eyot® Bottle Opener gebruikt om het dopje van het flesje af te draaien let u er dan op dat u het dopje van het flesje volledig los draait en daarna het dopje van het flesje afneemt. Voorkom dat u het flesje onbedoeld omhoog trekt.