

1. Príprava:



Umyte si ruky a sadnite si na stoličku s nízkym operadlom.

Vsuňte zatvorenú fľaštičku dnom dopredu do zariadenia tak, aby bola pevne uchytená v svojej pozícii.

Pred každým použitím sa presvedčte, že fľaštička je pevne umiestnená v zariadení.



Odskrutkujte uzáver fľaštičky.

Vezmite zariadenie do ruky.

Zariadenie musíte držať tak, aby zrkadlo bolo na spodnej strane (viď foto).

2. Umiestnenie fľaštičky pred vaše oko:



Položte dolnú časť zariadenia tesne pod spodné viečko a jemne stiahnite očné viečko nadol, až kým sa nevytvorí „kapsa“ medzi viečkom a okom (viď foto).

Položte hornú časť zariadenia v blízkosti obočia oproti Vášmu čelu.



Pozrite sa okom do Eyot® zrkadla. Môže to byť jednoduchšie ak zavriete alebo si zakryjete druhé oko.

Zariadenie a fľaštička sú teraz v správnej polohe.

3. Správna poloha hlavy.



Pozrite sa teraz cez dierku v hornej časti zariadenia.

Zakloňte hlavu, až kým cez dierku nevidíte strop nad Vami.

Vaša hlava je teraz v správnej polohe.

Opatrne prstami stlačte zariadenie. Kvapka by mala padnúť priamo do Vášho oka.

Postup môžete zopakovať pre druhé oko, ak vám to nariadil Váš lekár.

Zatvorte opäť fľaštičku s pomocou uzávera. Fľaštičku môžete ponechať v zariadení.

Prečítajte si leták pre doporučené čistenie zariadenia.

Návod na použitie zariadenia Travatan® Eyot®



Váš oftalmológ vám poskytol toto zariadenie, ktoré vám pomôže používať Vašu očnú roztokovú instiláciu Travatan®.

Výrobca:

Multidee Vianen
PO Box 135, 4130 EC Vianen, Holandsko

1020-0013-00 26.07.05

Distribútor:

Alcon Pharmaceuticals Ltd
Boesch 69, CH-6331 Hünenberg, Švajčiarsko



Travatan® je registrovaná obchodná značka
Eyot® je registrovaná obchodná značka
Patenty v riešení

Informácie:

V prípade potreby sa prosíme kontaktujte so svojím ošetrovateľom lekárom

Travatan® Eyot®:

Starostlivo si prečítajte tieto inštrukcie pred použitím zariadenia Travatan® Eyot®.

Dôležité je, aby ste používali Váš liek pravidelne, podľa odporúčenia Vášho lekára. Ďalšie informácie o použití očnej roztokovej instilácie Travatan®, môžete nájsť v príbalovom letáku vloženom v každom balení očnej roztokovej instilácie Travatan®.

Doporučené čistenie:

Ponechajte fľaštičku v zariadení a utrite zariadenie čistou a suchou handričkou.

Ak je to potrebné, vyberte fľaštičku a umyte zariadenie vlažnou vodou a osušte suchou, čistou handričkou. Nepoužívajte horúcu alebo vriacu vodu. Neumývajte zariadenie v umývačke riadu.

Ďalšie informácie:

Skontrolujte pred každým použitím správne umiestnenie fľaštičky v zariadení.

Travatan® Eyot® môže byť používaný iba v kombinácii s očnou roztokovou instiláciou Travatan®. Toto zariadenie poskytuje jednoduchú, alternatívnu techniku kvapkania (instilácie).

Travatan® fľaštičku môžete ponechať v zariadení Travatan® Eyot®.

Travatan® Eyot® je vyrobený z recyklovateľného termoplastického syntetického materiálu. Zrkadlo je vyrobené z pokovovaného polyestru.