

## 1. Förberedelser



Tvätta dina händer.  
Sitt i en stol med ett lågt ryggsöd.  
Tryck ner den stängda flaskan (med botten neråt) i droppstödet tills den sitter fast ordentligt.  
Skruva av flaskans lock.



Kontrollera före varje användningstillfälle att flaskan sitter ordentligt i droppstödet.  
Håll droppstödet i din hand.  
Du ska hålla droppstödet så att spegeln befinner sig i nederkanten (se bilden).

## 2. Att placera flaskan framför ditt öga



Placera den nedre delen av droppstödet alldeles nedanför ditt under ögonlock och dra försiktigt ögonlocket nedåt tills en "ficka" bildas mellan ögonlocket och ditt öga (se bild).



Placera den övre delen av droppstödet mot pannan nära ditt ögonbryn.  
Sök efter bilden av ditt öga i spegeln på **Eyot**. Det kan vara lättare om du stänger eller täcker över ditt andra öga.  
Droppstödet och flaskan är nu korrekt placerade.

## 3. Att placera huvudet korrekt



Titta nu upp genom hålet i övre delen av droppstödet.  
Luta huvudet bakåt tills du kan se taket direkt ovanför dig genom hålet.  
Nu är ditt huvud korrekt placerat.

Tryck ihop droppstödet noggrant med dina fingrar.  
Droppen ska nu falla direkt ner i ögat.  
Du ska upprepa processen med ditt andra öga om din läkare föreskrivit det.  
Stäng flaskan med locket. Flaskan kan sitta kvar i droppstödet.  
Se nästa sida för rengöringsinstruktioner.

## Tillbehör



Sätt den mindre sidan av flasköppnaren på korken och skruva av korken.

Se till att flaskan blir kvar i droppstödet  
Du kan lämna kvar flasköppnaren på flaskans kork.



Din ögonläkare har givit dig det här droppstödet för användning med Travatan ögondroppar.

## Manufacturer:

Multidee Vianen  
PO Box 135, 4130 EC Vianen, the Netherlands.

1020-0008-00 26.07.05

## Distributor:

Alcon Sverige AB  
Gustavslundvägen 151F  
161 36 Bromma, Sweden



Travatan® is a registered trade name.

Eyot® is a registered trade name.

Patents pending.

## Travatan® Eyot®

Läs de här instruktionerna noga innan du använder Travatan **Eyot** droppstöd.

Det är viktigt att du använder ditt läkemedel regelbundet så som din läkare föreskrivit. Ytterligare upplysningar om användningen av Travatan finner du i bipacksedeln som finns i varje förpackning av Travatan.

## Ytterligare upplysningar

Kontrollera före varje användning att flaskan sitter ordentligt i droppstödet.

Travatan **Eyot** ska bara användas tillsammans med Travatan ögondroppar. Droppstödet erbjuder en enkel alternativ tillförseteknik.

Läs bipacksedeln för Travatan för ytterligare upplysningar.

## Råd om rengöring

Lämna flaskan i droppstödet och torka av droppstödet med en ren torr trasa.

Om nödvändigt kan man ta bort flaskan och tvätta droppstödet med ljummet vatten. Torka det torrt med en ren trasa. Använd inte varmt eller kokande vatten. Rengör inte droppstödet i diskmaskin.

Du kan låta Travatan-flaskan sitta kvar i Travatan **Eyot**.

Travatan **Eyot** är tillverkad av återvinningsbar syntetisk termoplast. Spegeln är gjord av metallisk polyester.

## Varning



Detta hjälpmedel kan endast användas tillsammans med en Travatan 2.5 ml flaska från Alcon Laboratories

För att undvika eventuell skada, se till att flaskan förs ordentligt in i hjälpmedlet.

I det fall du använder det extra tillvalet Eyot Flasköppnare, säkerställ att flaskan stannar kvar inuti hjälpmedlet. Dra inte av flaskans kork utan att först ha sett till att korken är ordentligt avskruvad från flaskan