

Etape 1

Lavez-vous les mains et prenez place sur une chaise à dossier pas trop haut.



Lisez entièrement cette notice.

Dévissez le capuchon du flacon.



Etape 2

Glissez le flacon dans l'Eyot®. L'embout compte-gouttes doit être complètement enfoncé dans l'Eyot®.

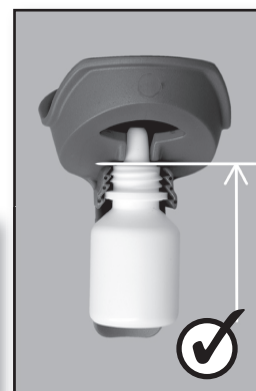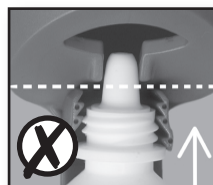

Etape 3

Placez l'Eyot® sous la paupière inférieure et tirez doucement la paupière vers le bas jusqu'à ce que l'Eyot® soit appuyé sur votre pommette.



Etape 4

Faites basculer le haut de l'Eyot® contre votre sourcil.

L'embout compte-gouttes se trouve alors exactement face à votre œil.



Etape 5

Renversez la tête en arrière jusqu'à ce que l'orifice vous permette de voir le plafond à la **verticale** au-dessus de vous.

Faites tomber la goutte dans votre œil en pressant le flacon entre le pouce et l'index.

Retirez le flacon de l'Eyot®, ensuite refermez-le.



Mode d'emploi

Accessoire pour l'administration de gouttes dans les yeux.



Fabricant:

Multidee Inventors
Postbus 135, 4130 EC Vianen, Pays-Bas

Numeró de l'article: 1010-0022-01 150306

Distributeur:

Mary Penley Eyot
2073 Avery Lane, RR #2
L3V 6H2 Orillia, Ontario



Eyot® est un nom de marque déposé.
Demande de brevet déposée.

Autres spécifications sur le produit

L'Eyot® est un accessoire universel pour l'administration de gouttes dans les yeux à utiliser uniquement en combinaison avec des flacons compte-gouttes en matière plastique souple.

Ne pas utiliser l'Eyot® en combinaison avec des flacons compte-gouttes en verre ou en matière plastique dure ou rigide.

Ce dispositif constitue une technique d'installation alternative et simple.

N'utiliser que des flacons dont l'embout compte-gouttes est d'une longueur comprise entre 8 et 14 millimètres.

L'Eyot® est réalisé en matière thermoplastique recyclable.

L'Eyot® est conforme à la directive CE 93/42 pour les Dispositifs médicaux, Classe 1.

Nettoyage

Rincer l'Eyot® à l'eau froide tout de suite après son utilisation, le tamponner avec un chiffon propre pour le sécher et le conserver à l'abri de la poussière.

Ne pas faire bouillir l'Eyot® pour le nettoyer, ne nettoyer pas le dispositif au lave-vaisselle, ne pas l'utiliser à d'autres fins que celle indiquée et le garder pour son usage personnel.

