

## Steg 1

Läs igenom hela denna instruktion.

Tvätta dina händer och sätt dig på en stol med lagom högt ryggstöd.



Öppna ögondroppsfliaskan.



## Steg 2

Skjut in flaskan i Eyot®.

Se till att flaskan är fullt inskjuten i greppen.

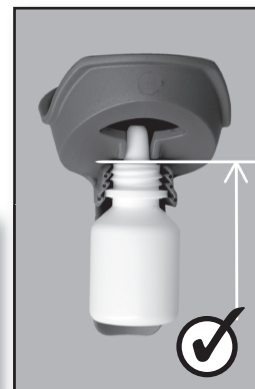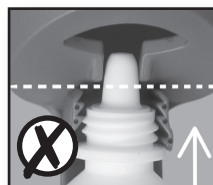

## Steg 3

Placera Eyot® under det undre ögonlocket och dra försiktigt ned det så att Eyot® vilar på kindbenet.



## Steg 4

Luta Eyot® mot ögonbrynet.



## Steg 5

Håll flaskspetsen rakt över ögat.

Luta huvudet bakåt och titta upp genom öppningen mot taket rakt ovanför dig.

Tryck på flaskan för att få ut en droppe.



## Användarinstruktion

Universellt droppstöd för mjuka plastflaskor.



### Tillverkare:

Artikelnummer 1010-0011-00 06032006

Multidee Inventors  
PO Box 135, 4130 EC Vianen, The Netherlands

### Distributör:

Alcon Sverige AB  
Box 12233  
102 26 STOCKHOLM



Eyot® is a registered trade name.  
Patents pending.

## Ytterligare produktinformation.

Eyot® är ett universellt ögondropsstöd, som endast passar till mjuka plastflaskor.

Ögondropsflaskor gjorda av glas eller hårdplast kan ej användas tillsammans med Eyot®.

Använd endast ögondropsflaskor där spetsen är mellan 8 och 14 mm.

Eyot® är tillverkad av en återvinningsbar termoplastisk syntetisk resin.

Sluta använda och släng Eyot® om den blivit skadad.

Eyot® överensstämmer med kraven i EG direktiv 93/42  
The Medical Devices Act classification 1.

## Rengöring

Rengör din Eyot® direkt efter användande med kallt vatten och torka med en ren, torr trasa.

Koka ej Eyot®. Använd den ej för något annat ändamål och behåll den för ditt personliga bruk

