

# Benutzeranweisung für das rote Eyot®

## Schritt 1

Dieses Hilfsgerät nur in Verbindung mit völlig eindrückbaren Augentropfenfläschchen aus Plastik verwenden.

Waschen Sie Ihre Hände und setzen Sie sich in einen Stuhl mit einer nicht zu hohen Rückenlehne.

Lesen Sie diesen Beipackzettel völlig durch.



## Schritt 2

Drehen Sie den Verschluss von dem Fläschchen.

Schieben Sie das Fläschchen in das Eyot®.

Die Tröpferspitze muss ganz durch das Eyot® stecken.



## Schritt 3

Stellen Sie das Eyot® unter das Augenlid und ziehen Sie mit dem Eyot® das Augenlid vorsichtig nach unten, so dass das Eyot® auf dem Jochbein ruht.



## Schritt 4

Kanten Sie das Eyot® auf Ihre Augenbraue.

Die Tröpferspitze des Fläschchens befindet sich genau vor Ihrem Auge.




## Schritt 5

Beugen Sie den Nacken nach hinten und gucken Sie durch die Öffnung, bis Sie die Decke senkrecht über sich sehen.

Tröpfeln Sie in das Auge, indem Sie das Fläschchen eindrücken.

Nehmen Sie das Fläschchen aus dem Eyot® und stellen Sie den Verschluss wieder auf das Fläschchen.

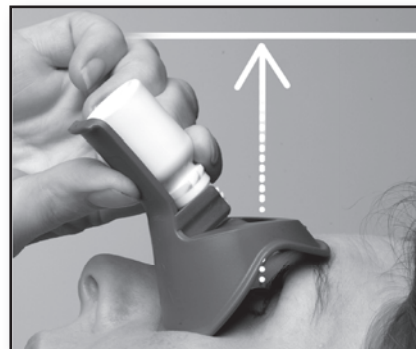

## Benutzeranweisung

Bitte wenden für Reinigungsanweisungen und sonstige Produktangaben.

Hilfsgerät beim Augentropfen.



### Hersteller:

Multidee Inventors  
Postfach 135, 4130 EC Vianen, Nederland/Niederlande

Artikelnummer 1010-0041-00 03032006

### Verteilung:

n.v. Alcon-Couvreur s.a.  
Rijksweg 14, 2870 Puurs, Belgien



Eyot® ist eine registrierte Schutzmarke.  
Patente angemeldet.

# Benutzeranweisung für das hellblaue Eyot®

## Schritt 1

Dieses Hilfsgerät nur in Verbindung mit 5 ml-Fläschchen von Alcon Laboratories verwenden.

Waschen Sie Ihre Hände und setzen Sie sich in einen Stuhl mit einer nicht zu hohen Rückenlehne.

Lesen Sie diesen Beipackzettel völlig durch.



## Schritt 2

Schieben Sie das verschlossene Fläschchen bis zum Anschlag fest in das Hilfsgerät. Vor jedem Gebrauch prüfen, ob sich das Fläschchen bis zum Anschlag im Hilfsgerät befindet.

Entfernen Sie den Verschluss.

### Achtung:

Die Obenseite des Fläschchens darf die markierte Linie nicht überragen!




## Schritt 3

Nehmen Sie das Hilfsgerät in die Hand.

Sie sehen, dass sich der kleine Spiegel unter dem Fläschchen befindet.

Stellen Sie das Hilfsgerät unter das Augenlid und ziehen Sie das Augenlid nach unten bis das Eyot® auf dem Jochbein ruht.

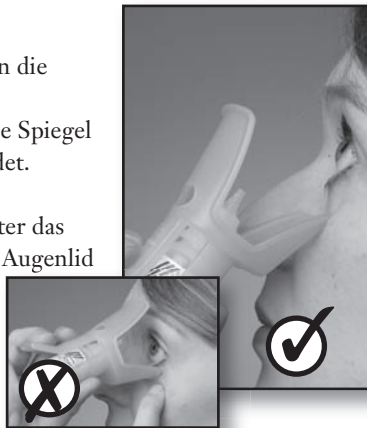

## Schritt 4

Kanten Sie das Eyot® auf Ihre Augenbraue.

Im kleinen Spiegel sehen Sie Ihr Auge.

Hilfsgerät und Fläschchen befinden sich jetzt in der richtigen Position.




## Schritt 5

Gucken Sie jetzt durch das Guckloch und beugen Sie den Nacken ganz nach hinten, bis Sie die Decke **senkrecht** über sich sehen.

Ihr Kopf befindet sich jetzt in der richtigen Position.

Drücken Sie mit den Fingern vorsichtig in das Hilfsgerät. Die Augentropfen tröpfeln in das Auge. Schließen Sie das Fläschchen wieder. Lassen Sie das Fläschchen im Hilfsgerät.

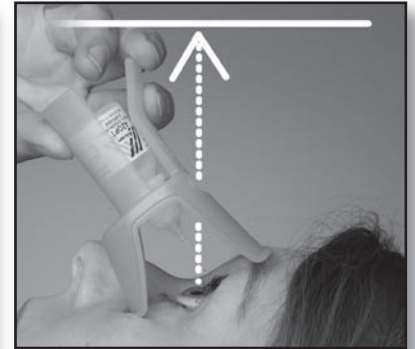

## Weitere Produktangaben

Bitte wenden für Adressen.

Rotes Eyot® ist ein universelles Hilfsgerät für das Tröpfeln von Augen, das ausschließlich in Verbindung mit völlig eindrückbaren Augentropfenfläschchen aus Plastik verwendet werden kann.

Das hellblaue Eyot® ausschließlich in Verbindung mit 5 ml-Fläschchen von Alcon verwenden.

Augentropfenfläschchen aus Glas oder aus hartem/steifem Plastik nicht in Verbindung mit dem Eyot® verwenden.

Verwenden Sie bei dem roten Eyot® nur Augentropfenfläschchen, deren Tröpferspitzze zwischen 8 und 14 Millimeter lang ist.

Eyot® ist aus wiederverwendbarem thermoplastischem Kunststoff hergestellt.

Eyot® kann nur als eine andere Technik zum Tröpfeln angewendet werden.

Eyot® entspricht der EC-Richtlinie 93/42 für Medical Devices Class 1.

## Reinigung

Nach dem Gebrauch das Eyot® sofort mit kaltem Wasser reinigen und mit einem sauberen Tuch trocknen; staubfrei aufbewahren. Das Eyot® nicht auskochen, nicht in der Spülmaschine reinigen und nicht für andere Zwecke verwenden. Nur für eigenen Gebrauch behalten.