

# Instructions d'emploi pour l'Eyot® de couleur rouge

## Étape 1

Ce dispositif d'aide à l'instillation doit être **uniquement** utilisé avec des flacons de gouttes oculaires en plastique souple.

Lavez-vous les mains et asseyez-vous sur un siège vous permettant de vous incliner vers l'arrière.


Lisez l'intégralité de cette notice d'emploi.



## Étape 2


Dévissez le bouchon du flacon.

Enfoncez le flacon dans l'Eyot®. Le goulot du flacon doit s'adapter complètement au système.

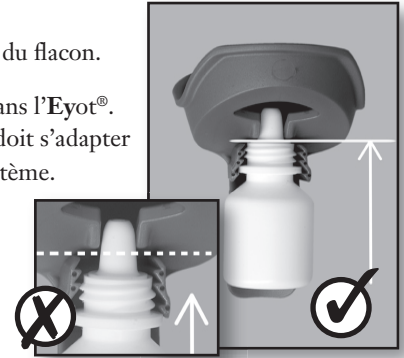

## Étape 3

Positionnez l'Eyot® juste en dessous de votre paupière inférieure et tirez celle-ci précautionneusement vers le bas jusqu'à ce que l'Eyot® repose sur votre pommette en formant une poche entre votre paupière et votre œil.

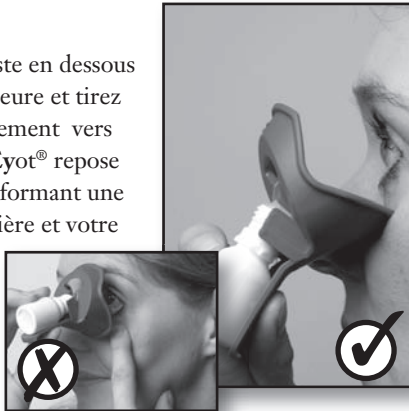

## Étape 4

Positionnez la partie supérieure du dispositif au niveau de vos sourcils.

L'embout compte-gouttes doit se trouver exactement face à votre œil.




## Étape 5

Inclinez votre tête vers l'arrière et regardez à travers l'ouverture jusqu'à ce que vous voyiez la partie du plafond située **juste au-dessus** de votre tête.

Appuyez doucement sur le flacon pour instiller.

Retirez le flacon de l'Eyot®, ensuite refermez-le.

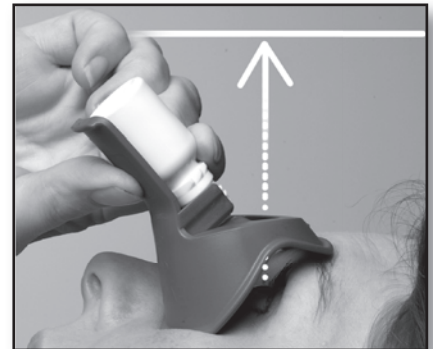

## Notice d'emploi

Pour les informations générales et instructions de nettoyage, voir au dos

Dispositif d'aide à l'instillation



**Fabricant:**

Multidee Inventors  
Boîte postale 135, 4130 EC Vianen, Pays-Bas

Numéro de l'article 1010-0042-00 01032006

**Distributeur:**

n.v. Alcon-Couvreur s.a.  
Rijksweg 14, 2870 Puurs, Belgique



Eyot® est un nom de marque déposée,  
brevets en cours

# Instructions d'emploi pour l'Eyot® de couleur bleu clair

## Etape 1

Ce dispositif d'aide à l'instillation doit être uniquement utilisé avec les flacons de 5 ml des laboratoires Alcon.

Lavez-vous les mains et asseyez-vous sur un siège vous permettant de vous incliner vers l'arrière.

Lisez l'intégralité de cette notice d'emploi.



## Etape 2

Enfoncez entièrement le flacon fermé dans l'Eyot. Avant chaque utilisation, vérifiez que le flacon est fermement enfoncé dans le dispositif.

Dévissez le bouchon du flacon.

### Avertissement:

La partie supérieure du flacon ne peut dépasser le trait imprimé dans le dispositif.



## Etape 3

Saisissez le dispositif. Vous devez le tenir de telle façon que le miroir soit en bas.

Positionnez l'Eyot juste en dessous de votre paupière inférieure et tirez celle-ci précautionneusement vers le bas jusqu'à ce que l'Eyot repose sur votre pommette en formant une poche entre votre paupière et votre œil.



## Etape 4

Positionnez la partie supérieure du dispositif au niveau de vos sourcils.

Vous pouvez voir votre œil dans le miroir.

Le dispositif et le flacon sont maintenant correctement positionnés.




## Etape 5

Inclinez votre tête vers l'arrière et regardez à travers l'ouverture jusqu'à ce que vous voyiez la partie du plafond située **juste au-dessus** de votre tête.

Votre tête est maintenant correctement positionnée.

Appuyez doucement sur le dispositif. La goutte doit tomber directement dans votre œil. Refermez le flacon, vous pouvez le laisser dans le dispositif.

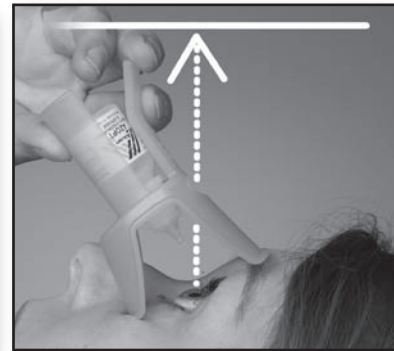

## Informations générales

Pour les adresses, voir au dos

L'Eyot® de couleur rouge est un dispositif d'aide à l'instillation universel qui doit s'utiliser uniquement avec des flacons de gouttes oculaires en plastique souple.

L'Eyot® de couleur bleu clair doit s'utiliser uniquement avec les flacons de 5 ml des Laboratoires Alcon.

Les flacons en verre ou de plastiques rigides ne peuvent être utilisés dans ce dispositif.

L'utilisation de L'Eyot® de couleur rouge ne peut se faire qu'avec des flacons dont la longueur du goulot est comprise entre 8 et 14 millimètres.

L'Eyot® est constitué d'un matériau thermoplastique synthétique recyclable.

Ce dispositif constitue une technique d'instillation alternative et simple.

Ce dispositif correspond aux recommandations EC 93/42 pour les Medical Device Class 1.

## Conseils de nettoyage :

Nettoyez immédiatement après l'emploi l'Eyot® avec de l'eau froide et séchez-le avec un tissu propre.

A conserver dans un endroit propre et sec.

N'utilisez pas d'eau chaude ou bouillante. Ne nettoyez pas le dispositif au lave-vaisselle.

Ne l'utilisez qu'à votre usage personnel et ne l'utilisez pas à d'autres fins que celles prévues par le fabricant.