

# Gebruikersinstructie voor de rode Eyot®

## Stap 1

Dit hulpstuk alleen gebruiken in combinatie met volledig indruk-bare plastic oogdruppelflesjes.


Was uw handen en ga zitten in een stoel met een niet te hoge rugleuning.

Lees deze bijsluiter helemaal.




## Stap 2

Draai het dopje van het flesje. Schuif het flesje in de Eyot®. Druppelaar moet helemaal door de Eyot® steken.

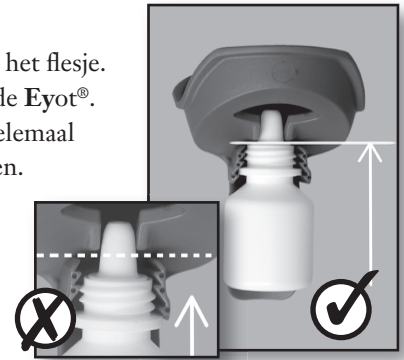

## Stap 3

Plaats de Eyot® onder uw ooglid en trek met de Eyot® het ooglid voorzichtig naar beneden toe open totdat de Eyot® op Uw jukbeen steunt.

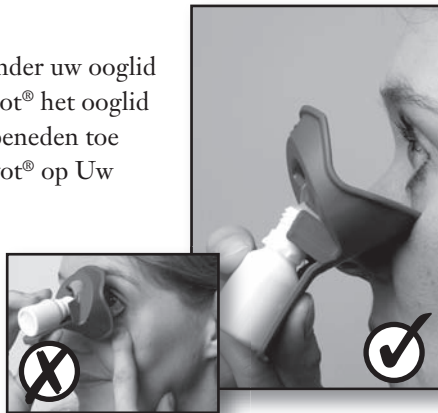

## Stap 4

Kantel de Eyot® op Uw wenkbrauw.

De druppelaar van het flesje bevindt zich recht voor Uw oog.




## Stap 5

Ga met uw hoofd achterover en kijk door de opening totdat u het plafond loodrecht boven u ziet.

Druppel in uw oog door in het flesje te knijpen.


Neem flesje uit de Eyot® en schroef dopje op flesje.

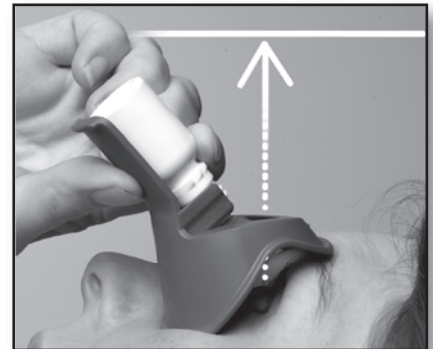

## Gebruikersinstructie

Z.o.z. voor reinigingsinstructies en overige productinformatie.

Hulpstuk bij het druppelen van uw ogen.

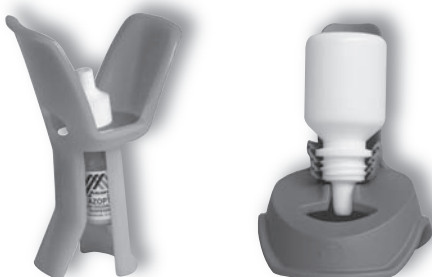

### Fabrikant:

Multidee  
Postbus 135, 4130 EC Vianen, Nederland

Artikelnummer 1010-0040-00 24022006

### Distributeur:

n.v. Alcon-Couvreur s.a.  
Rijksweg 14, 2870 Puurs, België



Eyot® is een geregistreerd handelsmerk.  
Patenten aangevraagd.

# Gebruikersinstructie voor de lichtblauwe Eyot®

## Stap 1

Dit hulpstuk alleen gebruiken in combinatie met 5 ml flesje van Alcon Laboratories.

Was uw handen en ga zitten in een stoel met een niet te hoge rugleuning.

Lees deze bijsluiter helemaal.



## Stap 2

Duw het gesloten flesje tot aanslag stevig in hulpstuk. Controleer vóór elk gebruik of flesje tot aanslag in hulpstuk zit. Draai dopje los.

### Waarschuwing:


De bovenkant van het flesje mag niet boven het ingegoten lijntje uitsteken!



## Stap 3

Neem hulpstuk in uw hand. Als u kijkt zit het spiegelkje beneden het flesje.

Plaats hulpstuk onder uw onderste ooglid en trek ooglid naar beneden toe verder open, totdat de Eyot® op uw jukbeen steunt.

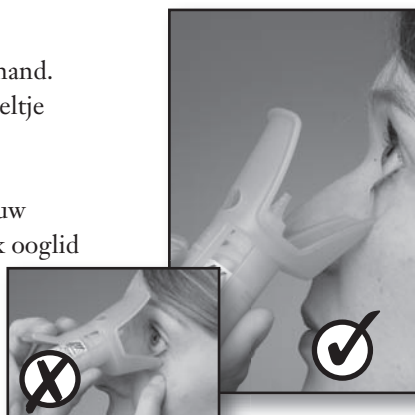

## Stap 4

Kantel de Eyot® op uw wenkbrauw.

U ziet in het spiegelkje uw oog.

Hulpstuk en flesje zijn in de juiste positie.




## Stap 5

Kijk nu door kijkgat en breng uw hoofd helemaal achterover totdat u plafond loodrecht boven u ziet.

Uw hoofd is nu in de juiste positie.

Knijp met uw vingers voorzichtig in het hulpstuk. De oogdruppel valt in uw oog. Schroef flesje weer dicht. Laat flesje in hulpstuk zitten.

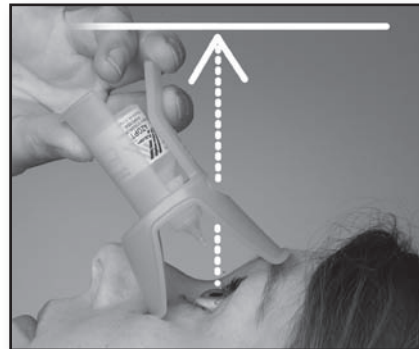

## Overige productinformatie

Z.o.z. voor adressen.

Rode Eyot® is een universeel oogdruppelhulpstuk dat uitsluitend in combinatie met volledig indrukbare plastic oogdruppelflesjes gebruikt kan worden.

De lichtblauwe Eyot® uitsluitend gebruiken in combinatie met 5 ml flesjes van Alcon.

Oogdruppelflesjes van glas of van harde/stijve plastics niet in combinatie met de Eyot® gebruiken.

Gebruik bij de rode Eyot® alleen oogdruppelflesjes waarvan de lengte van de druppelaar tussen 8 en 14 millimeter is.

Eyot® is gemaakt van een recycleerbare thermoplastische kunststof.

Eyot® voorziet alleen in een andere druppeltechniek.

Eyot® voldoet aan de EC richtlijn 93/42 voor Medical Devices Class 1.

## Reinigen

Na gebruik de Eyot® meteen reinigen met koud water en droog deppen met schone doek, stofvrij bewaren. Kook de Eyot® niet uit, niet in de vaatwasser en gebruik het niet voor andere doeleinden en houd het voor eigen gebruik.