

## Schritt 1

Waschen Sie Ihre Hände und setzen Sie sich auf einen Stuhl mit einer nicht zu hohen Rückenlehne.


Lesen Sie diesen Beipackzettel ganz durch.

Öffnen Sie den Schraubverschluss des Fläschchens.



## Schritt 2

Schieben Sie das Fläschchen in die Eyot® Anwendungshilfe. Die Spitze muss ganz in der Eyot® Anwendungshilfe stecken.

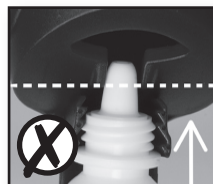

## Schritt 3

Legen Sie die Eyot® Anwendungshilfe unter Ihrem Unterlid an und ziehen Sie das Unterlid vorsichtig nach unten, bis die Eyot® Anwendungshilfe auf ihrem Wangenknochen ruht.



## Schritt 4

Legen Sie die Oberkante der Eyot® Anwendungshilfe auf Ihre Augenbraue.

Die Tröpfelspitze des Fläschchens befindet sich genau vor Ihrem Auge.



## Schritt 5

Neigen Sie Ihren Kopf nach hinten und schauen Sie durch die Öffnung, bis Sie die Zimmerdecke **senkrecht über sich** sehen.

Drücken Sie auf das Fläschchen um die Tropfen in Ihr Auge fallen zu lassen. Nehmen Sie das Fläschchen aus dem Eyot® und stellen Sie den Verschluss wieder auf das Fläschchen.



## Gebrauchsanweisung

Hilfe für die Anwendung von Augentropfen.



### Hersteller:

Multidee Inventors  
Postbus 135, 4130 EC Vianen, Niederlande

artikelnummer: 1010-0020-01 150306

### Vertrieb:

Allergan BV  
Edisonbaan 14 C-2, 3439 MN Nieuwegein, Niederlande



Eyot® ist ein registriertes Warenzeichen.  
Patente angemeldet.

## Sonstige Produktinformationen

Eyot® ist eine universelle Hilfe zur Anwendung von Augentropfen, die ausschließlich in Kombination mit Plastik Augentropfenfläschchen, die sich vollständig eindrücken lassen, verwendet werden kann.

Augentropfenfläschchen aus Glas oder aus hartem Plastik sind in Kombination mit der Eyot® Anwendungshilfe nicht verwendbar.

Eyot® kann nur als eine andere Technik zum Tröpfeln angewendet werden.

Verwenden Sie nur Augentropfenfläschchen, deren Spitze zwischen 8 und 14 Millimeter lang ist.

Eyot® wurde aus recyclebarem thermoplastischem Kunststoff hergestellt.

Eyot® entspricht der EC-Richtlinie 93/42 für Medizinprodukte der Klasse 1.

## Reinigung

Nach Gebrauch die Eyot® Anwendungshilfe sofort mit kaltem Wasser reinigen und mit einem sauberen Tuch trocknen; staubfrei aufbewahren.

Die Eyot® Anwendungshilfe nicht auskochen, nicht in der Spülmaschine reinigen und nicht für andere Zwecke verwenden und nur zum persönlichen Gebrauch verwenden.

