

1. Voorbereiding



Was uw handen.
Ga zitten in een stoel met een lage rugleuning.
Duw het gesloten flesje tot de aanslag stevig in het hulpstuk.
Controleer vóór elk gebruik of het flesje tot de aanslag in het hulpstuk zit.



Draai het dopje los.
Neem het hulpstuk in uw hand.
Als u kijkt zit het spiegelkje beneden het flesje. (zie foto)

2. Flesje voor uw oog zetten



Plaats het hulpstuk onder uw onderste ooglid en trek het ooglid naar beneden toe verder open.



Laat nu de bovenkant van het hulpstuk nabij uw wenkbrauw, op uw voorhoofd rusten.
U ziet in het spiegelkje uw oog.
Hulpstuk en flesje zijn in de juiste positie.

3. Hoofd achterover brengen



Kijk nu door het kijkgat.
Breng uw hoofd achterover totdat u het plafond **loodrecht** boven u ziet.
Uw hoofd is nu in de juiste positie.

Knijp met uw vingers voorzichtig in het uiteinde van het hulpstuk. De oogdruppel valt in uw oog.
Schroef het flesje weer dicht.
Laat het flesje in het hulpstuk zitten.

Voor reinigingsadvies z.o.z.

Gebruiksaanwijzing DuoTrav™Eyot®



DuoTrav™Eyot®

**Voor optimale
toediening van
uw oogdruppels.**

Uw oogarts heeft u dit
hulpstuk meegegeven
om nog beter te kunnen
druppelen.

Fabrikant:

Multidee Vianen
Postbus 135, 4130 EC Vianen, Nederland

1021-0010-00 10.07.06

Distributeur:

Alcon Nederland BV
Avelingen West 5, 4202 MS Gorinchem



DuoTrav™ is a registered trade name.
Eyot® is a registered trade name.
Patents pending.

DuoTrav™Eyot®

Leest u voordat u het DuoTrav™Eyot® hulpstuk
gebruikt deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

De gebruikelijke dosering van DuoTrav™ is
éénmaal daags één druppel. Zie ook de
bijsluiters van DuoTrav™ oogdruppels.

Reinigingsadvies

Droog reinigen:

Laat het flesje in het hulpstuk zitten en reinig
het hulpstuk met een schone droge doek.

Nat reinigen:

Verwijder het flesje. Spoel het hulpstuk met
lauw water af. Droog het met een schone doek.
Gebruik geen heet of kokend water. Het hulp-
stuk niet in de vaatwasser reinigen.

Overige Informatie

Controleer voor gebruik of het flesje goed geplaatst
is tot aan de aanslag.

DuoTrav™Eyot® is een oogdruppelhulpstuk dat uit-
sluitend in combinatie met DuoTrav™ oogdruppels
mag worden gebruikt. Dit hulpstuk voorziet uitslui-
tend in een andere druppeltechniek. Lees de
DuoTrav™ bijsluiters voor verdere informatie.

U kunt het DuoTrav™ flesje in de DuoTrav™Eyot®
laten zitten.

DuoTrav™Eyot® is gemaakt van
recyclebaar thermoplastisch kunststof.
De spiegel is van gemetalliseerd polyester.