

1. Voorbereiding




Was Uw handen en ga zitten in stoel met lage rugleuning.

Steek de gesloten ampul in de UD **Eyot**® tot deze niet verder gaat.




Klik het vast.

2. Flesje voor uw oog zetten

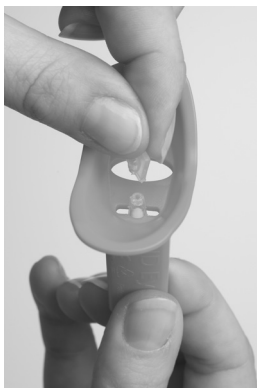

Breek het platte topje van de ampul af door het er af te draaien.

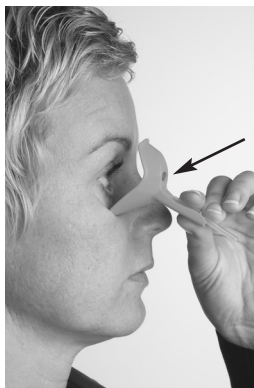


Houd de UD **Eyot**® zo in uw hand dat het kijkvenster boven het ampul zit.

3. Hoofd achterover brengen



Plaats de UD **Eyot**® onder uw onderste ooglid en trek het ooglid naar beneden toe zachtjes open.

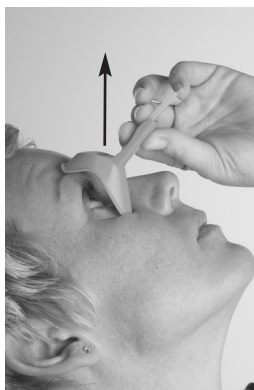

Kijk door kijkenster en buig uw hoofd achterover totdat u het plafond loodrecht boven u ziet.

Knijp met uw vingers in de ampul om te druppelen. Haal de ampul direct na gebruik uit de UD **Eyot**® en gooi de ampul weg.

Lees ook de bijsluiter van de ampul.

Gebruiksaanwijzing UD EYOT®




Een hulpstuk om gemakkelijk met CONSERVEERVRIJE glaucoomproducten van MSD te kunnen druppelen.

Lees deze bijsluiters vóór gebruik.

Fabrikant:
Multidee Vianen
Postbus 135, 4130 EC Vianen

1090-0010-01 270207

Distributeur:
MSD
Waarderweg 39
2031 BN Haarlem

 **Eyot®** is een gerigistreeerde merknaam

UD EYOT®

Leest u voordat u het **Eyot®** hulpstuk gebruikt deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

De gebruikelijke dosering van CONSERVEERVRIJE glaucoomproducten van MSD is éénmaal daags één druppel. Zie ook de bijsluiters van de CONSERVEERVRIJE glaucoomproducten van MSD.

Reinigingsadvies

Reinig de UD **Eyot®** dagelijks bij het vervangen van de ampul.

Spoel het met lauw water af en droog het met een schone doek.

Niet uitkoken en niet in vaatwasmachine reinigen.

Overige informatie

De UD **Eyot®** is uitsluitend geschikt voor de ampullen van CONSERVEERVRIJE glaucoomproducten van MSD. Beschadigde UD **Eyot®** onmiddellijk weggooien. De UD **Eyot®** voorziet uitsluitend in een andere techniek om uw ogen te druppelen.

Lees altijd de bijsluiters van de CONSERVEERVRIJE glaucoomproducten van MSD vóórdat u de UD **Eyot®** gebruikt.

De UD **Eyot®** is van een recyclebare thermoplastische kunststof gemaakt.