

## 1. PREPARAÇÃO



Lave as mãos e sente-se numa cadeira com encosto baixo.

Ponha a unidose no Eyot®, introduzindo primeiro o topo.




Encaixe bem a unidose no Eyot®.

## 2. COLOCAÇÃO DA UNIDOSE EM FRENTE DO OLHO



Retire o topo da unidose, rodando a extremidade até abrir.

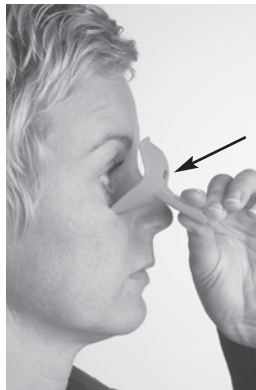


segure o Eyot® de modo a que a "janela" esteja acima da unidose.

Coloque a parte inferior do Eyot® debaixo do olho e pressione ligeiramente a pálpebra inferior de modo a manter o olho bem aberto.

## 3. COLOCAÇÃO DA CABEÇA NA POSIÇÃO CORRECTA



Apoie a parte superior do Eyot® na zona da sobrancelha. Quando olha em frente, verá o topo da unidose como um ponto branco.

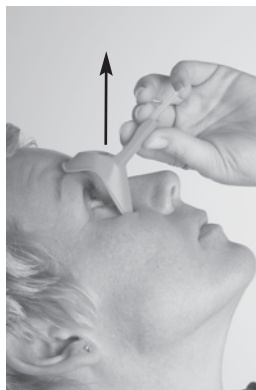

Olhe para cima através da "janela" do Eyot® e aperte a unidose até que uma ou duas gotas (conforme prescrito) caiam no olho.

Leia cuidadosamente o folheto informativo que acompanha a sua medicação.

# INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO EYEOT®



Auxiliar de aplicação  
de gotas oftálmicas.

Por favor, leia este  
folheto atentamente.

**Produzido por:**  
Multidee Inventors  
PO Box 135  
4130 EC Vianen  
The Netherlands

**Distribuidor:** 1090-0014-00 151008  
MSD Portugal  
Quinta da Fonte  
Edifício Vasca da Gama, 19  
2770-192 Paço de Arcos  
PORTO SALVO

MSD é uma marca registada.  
Eyot® é uma marca registada.

Protegido por patente.



## CONSELHOS DE LIMPEZA

Limpe o Eyot® diariamente após a utilização  
usando água morna.

Seque o Eyot® com um pano limpo.

Não use água quente ou a ferver.  
Não lave o Eyot® na máquina da loiça.

## OUTRAS INFORMAÇÕES

O Eyot® foi desenvolvido para ser usado  
com as unidoses de soluções oftálmicas da MSD.

Não use um Eyot® danificado.

Tome ou aplique a sua medicação tal como foi prescrito  
pelo seu médico e de acordo com  
a descrição do folheto informativo.

O Eyot® é feito de uma resina termoplástica  
é reciclável.