

1. Før brug



Vask hænderne.
Sæt dig i en stol med lavt ryglæn, så det er let at læne hovedet bagover.
Hold fast i det lukkede låg og skub flasken ned i **Eyot**[®] dråbestøtten.
Drej låget af.



Kontroller altid før brug, at flasken sidder fast i dråbestøtten.
Hold dråbestøtten i hånden, og sørg for at spejlet i dråbestøtten vender nedad.

2. Rigtig placering af flasken over øjet



Placér nederste del af dråbestøtten lige under øjet. Træk forsigtigt ned således at der dannes en "lomme" mellem øjenlåget og øjet.
Placér den øverste del af dråbestøtten mod panden nær øjenbrynet.



Se efter dit øje i dråbestøttens spejl. Det kan være lettere at se, hvis du holder dig for det andet øje.
Dråbestøtten med Travatan[®] flasken er nu placeret korrekt over øjet.

3. Rigtig placering af hovedet



Se igennem hullet i den øverste del af dråbestøtten.
Læn hovedet bagover, så du kan se loftet over dig gennem hullet i dråbestøtten.
Dit hoved er nu placeret rigtigt.
Klem forsigtigt på dråbestøtten. Dråben skal ramme øjet.

Hvis det andet øje også skal behandles gentages processen.

Når du har afsluttet behandlingen skrues låget på flasken igen. Flasken kan opbevares i dråbestøtten.

For rengøring af dråbestøtten – se afsnittet "Råd om rengøring".

Tilbehør (ekstraudstyr)



Tryk **Eyot**[®] flaskeåbnerens lille side ned på flaskens låg og vrid låget af.

Sørg for, at flasken forbliver korrekt i hjælperen.

Du kan lade **Eyot**[®] flaskeåbneren blive siddende på flaskens låg.



Du har fået en **Eyot®** Dråbestøtte, som er et hjælpemiddel designet til dig, når du tager dine Travatan® øjendråber.

Fremstiller:

Multidee Vianen
PO Box 135, 4130 EC Vianen, Holland.

1020-0009-00 26.07.05

Distributør:

Alcon Danmark A/S
Rødovre Parkvej 25
2610 Rødovre



Travatan® er et registreret varemærke.
Eyot® er et registreret varemærke.
Patenter ansøgt.

Travatan®Eyot® Dråbestøtte

Læs instruktionerne nøje før du anvender Travatan®Eyot® Dråbestøtte.

Det er vigtigt, at du anvender medicinen som anvist af lægen.

Yderligere information om Travatan® øjendråber findes i indlægssedlen, som er i alle Travatan® pakninger.

Råd om rengøring

Lad flasken blive i dråbestøtten og aftør med en tør klud.

Hvis det er nødvendigt, tages flasken ud og dråbestøtten afvaskes med lunkent vand og tørres derefter af med en ren klud. Anvend ikke varmt eller kogende vand. Dråbestøtten bør ikke vaskes i opvaskemaskinen.

Anden information

Før du anvender dråbestøtten, skal du sikre dig, at flasken sidder godt fast.

Travatan®Eyot® Dråbestøtte kan kun anvendes til Travatan® øjendråber og er en hjælp for dig, når du skal dryppe med Travatan® øjendråber. Læs indlægssedlen for Travatan® øjendråber for yderligere oplysninger.

Travatan® flasken kan opbevares i Travatan®Eyot® Dråbestøtte.

Travatan®Eyot® Dråbestøtte er fremstillet af recirkuleret, termoplastisk, syntetisk materiale. Spejlet er fremstillet af metallisk polyester.

Advarsel



Denne dråbestøtte er kun beregnet til anvendelse sammen med Alcons Travatan® 2,5 ml flaske.

For at undgå risiko for personskade, skal du sørge for, at flasken sidder godt fast i dråbestøtten.

Hvis du bruger **Eyot®** flaskeåbneren (ekstraudstyr), skal flasken forblive korrekt i dråbestøtten. Flaskens låg må først tages af, når det er skruet helt fri af flasken.