

1. Préparation



Lavez-vous les mains.
Asseyez-vous sur un siège vous permettant de vous incliner vers l'arrière.
Laissez le flacon fermé et enfoncez-le par la base dans le dispositif, jusqu'à ce qu'il soit bien positionné.
Dévissez le bouchon du flacon.



Avant chaque utilisation, vérifiez que le flacon est fermement enfoncé dans le dispositif.
Saisissez le dispositif.
Vous devez le tenir de telle façon que le miroir soit en bas (voir photo).

2. Comment positionner le flacon par rapport à votre œil



Positionnez la partie inférieure du dispositif juste en dessous de votre paupière inférieure. Tirez votre paupière vers le bas à l'aide du dispositif jusqu'à ce qu'une 'poche' se forme entre votre paupière et votre œil (voir photo).



Positionnez la partie supérieure du dispositif au niveau de vos sourcils, contre votre front.
Vous devez faire en sorte de voir votre œil dans le miroir de le Travatan® Eyot®. Ce sera plus facile si vous fermez/cachez l'autre œil.
Le dispositif et le flacon sont maintenant correctement positionnés.

3. Comment positionner correctement votre tête



Regardez à travers le trou présent dans la partie supérieure du dispositif.
Inclinez votre tête vers l'arrière jusqu'à ce que vous voyiez la partie du plafond située juste au-dessus de votre tête à travers le trou.
Votre tête est maintenant correctement positionnée.

Appuyez doucement sur le dispositif.
La goutte doit tomber directement dans votre œil.
Si cela est prescrit par votre médecin, répétez la procédure pour l'autre œil.
Refermez le flacon.
Vous pouvez laisser le flacon dans le dispositif.

Pour les instructions de nettoyage, voir au dos.

Accessoire (optionnel)



Introduisez le petit côté de l'ouvre-bouteille **Eyot®** sur le capuchon du flacon et dévissez le.

Faites attention à ce que le flacon demeure correctement dans le dispositif.
Vous pouvez laisser l'ouvre-bouteille **Eyot®** sur le capuchon du flacon

Instructions d'utilisation de le Travatan®Eyot®



Votre ophtalmologiste vous a remis ce dispositif pour vous aider à utiliser le collyre Travatan®.

Fabricant: 1020-0024-00 19.08.05
Multidee Vianen
P.O. Box 135, 4130 EC Vianen, Pays-Bas

Distributeur:
n.v. Alcon-Couvreur s.a.
Rijksweg 14, 2870 Puurs, Belgium



Travatan® est un nom de marque déposé.
Eyot® est un nom de marque déposé.
Brevets en cours.

Travatan®Eyot®

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le dispositif Travatan® Eyot®.

Il est important d'utiliser votre médicament conformément à la prescription de votre médecin.

Conseils de nettoyage

Laissez le flacon dans le dispositif et nettoyez ce dispositif avec un tissu propre et sec.

Si nécessaire, retirez le flacon et rincez le dispositif dans de l'eau tiède. Séchez-le avec un tissu propre. N'utilisez pas d'eau chaude ni bouillante. Ne nettoyez pas le dispositif dans un lave-vaisselle.

Autres recommandations

Avant chaque utilisation, vérifiez que le flacon est fermement positionné dans le dispositif.

Le Travatan® Eyot® doit être utilisé uniquement avec le collyre Travatan®. Ce dispositif constitue une technique d'instillation alternative et simple.

Pour de plus amples informations concernant l'utilisation du collyre Travatan®, référez-vous à la notice du Travatan®.

Vous pouvez laisser le flacon dans le Travatan® Eyot®.

Le Travatan® Eyot® est constitué d'un matériau thermoplastique synthétique recyclable. Le miroir est constitué d'un matériau polyester métallique.

Advertissement



Ce dispositif est uniquement d'application avec Travatan® 2,5ml de Alcon.

Afin d'éviter toute lésion, veuillez vous assurer que le flacon est bien enfoncé fermement dans le dispositif.

Dans le cas où vous utilisez l'ouvre-bouteille Eyot (optionnel), veuillez vous assurer que le flacon demeure bien en place à l'intérieur du dispositif. Ne retirez pas le bouchon avant de l'avoir dévissé complètement.