

Ettevalmistus



Peske oma käed.

Istuge madala seljatoega toolile.

Suruge suletud ravimpudel põhi ees seadmesse kuni pudel on kindlalt paigal.

Keerake kork pudelilt.



Kontrollige ennem iga kasutamist, et pudel on seadmes kindlalt paigas.


Võtke seade kätte.

Hoidke seadet nii, et peegel on alumisel poolel (vt pilti).

Seadme silma ette asetamine



Asetage seadme alumine osa silma alalau alla ja tõmmake seda kergelt tagasi kuni tekib "tasku" alalau ja silma vahele (vt pilti).

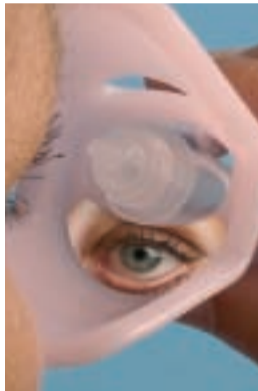

Asetage seadme ülemine osa kulmu lähedale vastu otsmikku.

Vaadake oma silma **Eyot**[®]i peeglist. Samal ajal võite teise silma sulgeda või kinni katta kui nii tundub mugavam.

Seade ja pudel on nüüd õiges positsioonis.

Õige asend peale



Vaadake läbi seadme
ülemises pooles oleva ava.

Painutage pea tahapoole
kuni näete läbi ava lage
otse enda pea kohal.

Teie pea on nüüd õiges
asendis.

Pigistage seadet kergelt sõrmedega.
Ravimi tilk peaks kukkuma otse silma.

Korrake sama protseduuri teisel silmal kui arst on nii määranud.

Sulgege pudel kindlalt korgiga.
Võite jätta ravimpudeli seadmesse.

Seadme puhastamise juhend vt järgmine lk

Travatan®Eyot®

Lugege seda informatsiooni tähelepanelikult
ennem Travatan®Eyot®i kasutamist.

On tähtis, et kasutate oma ravimit regulaarselt
vastavalt arsti soovitusetele.

Informatsiooni Travatan®i kasutamise kohta leiate
ravimi pakendis olevast Patsiendi infolehest.

Lisainfo

Kontrollige ennem iga kasutamist, et ravimpudel on kindlalt seadmes paigal.

Travatan®**Eyot**® on kasutamiseks ainult koos Travatan®i silmatilkadega. Seade pakub alternatiivset tilgutamise tehnikat. Lisainfoks lugege Travatan®i patsiendi infolehte.

Seadme puhastamine

Jätke suletud ravimpudel seadmesse ja pühkige seadet puhta kuiva lapiga.

Vajadusel võtke pudel seadmest ja loputage seadet leige veega. Kuivatage seade puhta lapiga. Ärge kasutage kuuma või keevat vett. Ärge peske seadet nõudepesumasinas.

Te võite hoida Travatan®`i pudelit Travatan®
Eyot®`is.

Travatan®**Eyot**® on valmistatud ümbertöödeldavast termoplastilisest sünteetilisest materjalist. Peegel on valmistatud metallpolüestrist.

Tootja:

1020-0035-00

Multidee Vianen

PO Box 135, 4130 EC Vianen, the Netherlands.

Levitaja:

Alcon Pharmaceuticals Ltd., Baltic Office

4-III A Torna, LV-1050

Riga, Latvia



Travatan® on registreeritud kaubanimetus.

Eyot® on registreeritud kaubanimetus.

Patendid taotlemisel.

Travatan®Eyot® Kasutusjuhend



Teie arst on andnud teile selle seadme, et muuta ravimi Travatan® silma tilgutamine teile lihtsamaks.