

## Før bruk:



Vask hendene dine.

Sitt i en stol med lavt ryggstø, slik at det er lett å bøye hodet bakover.

Sett inn flasken med bunnen først og med korken på, slik at flasken sitter fast i dråpe-støtten.

Skru av korken.



Kontrollér alltid før bruk  
at flasken sitter godt fast  
i dråpestøtten.

Hold dråpestøtten i hånden.

Hold dråpestøtten slik at  
speilet vender ned  
(se bildet).

## Riktig plassering av flasken foran øyet:



Plassér nedre del av dråpe-støtten like under nedre øyelokk. Trekk øyelokket forsiktig nedover, slik at det dannes en "lomme" mellom øyelokket og øyet (se bildet).



Plassér øvre del av dråpe-  
støtten nær øyebrynet mot  
pannen.

Se etter øyet ditt i dråpe-  
støttens speil. Dette kan være  
lettere å få til dersom du dek-  
ker/ lukker det andre øyet.

Dråpestøtten med Travatan-  
flasken er nå i korrekt posisjon.

## Riktig plassering av hodet:



Se så gjennom hullet i øvre del av dråpestøtten.

Bøy hodet bakover til du kan se taket rett over deg, gjennom hullet i dråpestøtten.

Hodet ditt er nå i riktig posisjon.

---

Klem forsiktig på dråpestøtten. Øyedråpen skal nå treffe øyet ditt.

Dersom du også skal behandle det andre øyet, gjenta prosedyren.

Når du er ferdig med behandlingen, skal korken skrues på flasken igjen. Flasken kan oppbevares i dråpestøtten.

Når det gjelder rengjøring av dråpestøtten - se avsnitt "Råd for rengjøring".

# Travatan®Eyot®

---

Les instruksjonene nøye før du begynner å bruke Travatan®Eyot® dråpestøtte.

Det er viktig at du bruker medisinene i henhold til legens anbefalinger.

Ytterligere informasjon om Travatan® øyedråper finnes i pakningsvedlegget, som er vedlagt alle Travatan® flasker.

## **Annen informasjon:**

---

Før bruk av dråpestøtten - sjekk alltid at flasken sitter godt fast.

Travatan®**Eyot**® dråpestøtte skal bare brukes til Travatan® øyedråper.

Dråpestøtten skal være til hjelp for deg, når du skal dryppe med Travatan® øyedråper.

Les Travatan® pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

## **Råd om rengjøring:**

---

La flasken stå i dråpestøtten, og tørk av med en tørr klut.

Om nødvendig, ta ut flasken og vask dråpestøtten med lunkent vann. Tørk deretter av med en ren klut. Bruk ikke varmt eller kokende vann. Dråpestøtten må ikke vaskes i oppvaskmaskin.

---

Travatan flasken kan oppbevares i Travatan®**Eyot**® dråpestøtte.

Travatan®**Eyot**® dråpestøtte er laget av resirkulert, termoplastisk, syntetisk materiale.

Speilet er laget av metallisk polyester.

---

**Produsent:**

1020-0038-00

Multidee Vianen

PO Box 135, 4130 EC Vianen, the Netherlands.

**Distributør:**

Alcon Norge AS

Eivind Lychesvei 10,

1338 Sandvika, Norge.



Travatan® er et registrert varemerke.

**Eyot**® er et registrert varemerke.

Patent inne til godkjenning.

## Brukerveiledning for Travatan®Eyot®

---



Du har nå mottatt en **Eyot**® dråpestøtte, som skal være til hjelp når du tar dine Travatan® øyedråper.