

1. Przygotowanie



Umyj ręce i usi d na krze le z niskim oparciem.

Wsu zamkni t butelk , zaczynaj c od denka, do przyrz du, dopóki nie zostanie w nim dobrze osadzona.

Zawsze przed u yciem sprawd , czy butelka jest dobrze osadzona w przyrz dzie. Odkr nakr tk .



We przyrz d do r ki.

Nale y trzyma przyrz d tak, by lusterko znajdowało si na dole (patrz: zdj cie).

2. Ustawienie butelki naprzeciw oka



Umie doln cz przyrz du nieco poni ej dolnej powieki i delikatnie poci gnij doln powiek do dołu a utworzy si „kieszonka” pomi dzy powiek i okiem (patrz: zdj cie).

Umie górn cz przyrz du na czole, tu obok brwi.



Spójrz w odbicie Twojego oka w lusterku Eyot®. B dzie to łatwiejsze, kiedy zakryjesz/zamkniesz drugie oko.

Teraz przyrz d i butelka s we wła ciwej pozycji.

3. Prawidłowe ustawienie głowy



Popatrz przez otwór w górnej cz ci przyrz du.

Przechyl głow do tyłu, a przez otwór w przyrz dzie bezpo rednio nad sob zoba czysz sufit.

Teraz Twoja głowa jest we wła ciwej pozycji.

Delikatnie ci nij przyrz d palcami. Kropla leku powinna spa Ci bezpo rednio do oka.

Ten proces nale y powtórzy z drugim okiem, je li jest to zgodne z zaleceniami lekarza.

Zań nakr tk na butelk . Butelka mo e pozosta w przyrz dzie.

Instrukcje dotycz ce czyszczenia przyrz du znajdziesz na odwrocie.

Instrukcja uycia aplikatora Travatan® Eyot®



Twój okulista dostarczył Ci ten przyrząd, by pomógł Ci w stosowaniu Twoich kropli do oczu Travatan®.

Wytwórca:

Multidee Vianen
PO Box 135, 4130 EC Vianen, Królestwo Niderlandów

1020-0020-02 09.06.06

Dystrybutor:

Alcon Polska Sp. z o.o.
ul. elazna 28/30, 00-832 Warszawa, Polska



Travatan® stanowi zastrzeżenie nazw handlowych.

Eyot® stanowi zastrzeżenie nazw handlowych.
Złożono zgłoszenie patentowe.

Travatan® Eyot®

Przed uyciem aplikatora Travatan® Eyot® uważaj nie przeczytaj niniejszej instrukcji.

Ważne jest regularne stosowanie leku zgodnie z zaleceniami lekarza.

Bliższe informacje na temat stosowania kropli do oczu Travatan® znajdziesz na ulotce informacyjnej leku załączonej do każdego opakowania Travatan®.

Czyszczenie

Zostaw butelkę w przyrządzie i wytrzyj czystą, suchą ściereczką.

W razie potrzeby wyjmij butelkę z przyrządu i wypłucz go w ciepłej wodzie. Wytrzyj do sucha czystą ściereczką. Nie używaj gorącej ani gotującej się wody. Nie wkładaj do zmywarki do naczyń.

Inne informacje

Przed uyciem sprawdź, czy butelka jest dobrze osadzona w przyrządzie.

Aplikator Travatan® Eyot® można używać wyłącznie z kroplami do oczu Travatan®. To urządzenie ułatwia zapuszczanie kropli do oczu.

Butelkę z kroplami do oczu Travatan® można trzymać w aplikatorze Travatan® Eyot®.

Aplikator Travatan® Eyot® został wykonany

z tworzywa termoplastycznego nadającego się do recyklingu. Lustro wykonano z poliestru metalicznego.