

HAZIRLAMA



Ellerinizi yıkayınız.
Sırtı alçak bir sandalyeye oturunuz.
Kapalı göz damlası şişesini, cihazın içine, önce şişenin tabanını sokarak, itiniz ve yerleşmesini sağlayınız.
Göz damlasının kapağını açınız.



Her kullanımdan önce, şişenin cihazın içinde sıkıca yerleşmiş olduğunu kontrol ediniz.
Cihazı elinize alınız.

Cihazı, ayna şişenin altında olacak şekilde tutunuz (resimde görüldüğü gibi).

ŞİŞEYİ GÖZÜNÜZÜN ÖNÜNE YERLEŞTİRME



Cihazın alt tarafını, alt göz kapağınızın hemen altına yerleştiriniz ve alt göz kapağını, göz kapağı ve gözünüz arasında bir "cep" oluşacak şekilde (resimde görüldüğü gibi) nazikçe aşağıya çekiniz.



Cihazın üst tarafını, kaşınızın yakınında, alnınıza dayayınız.

Eyot®'un aynasında gözünüze bakınız. Daha rahat görebilmek için, diğer gözünüzü kapatabilirsiniz.

Cihaz ve şişe şimdi doğru yerde durmaktadır.

BAŞINIZIN KONUMU



Şimdi cihazın üst kısmındaki delikten dışarıya doğru bakınız.

Delikten bakarak, tavanı görünceye kadar, başınızı arkaya eğiniz.

Başınız şimdi doğru durumdadır.

Cihazı, parmaklarınızla, dikkatle sıkınız. Damla, tam gözünüze damlayacaktır. Eğer doktorunuz tarafından önerilmişse, bu işlemleri diğer gözünüz için de uygulayınız. Şişenin kapağını kapatınız. Şişeyi cihazın içinde bırakabilirsiniz. Temizleme açıklamaları için arka sayfaya bakınız.

Travatan® Eyot® Kullanım Kılavuzu



Göz doktorunuz, size, bu cihazı Travatan® göz damlasının kullanımında yardımcı olmak üzere sağlamıştır.

Travatan® Eyot®

Travatan® Eyot® cihazını kullanmadan önce, bu kılavuzu dikkatle okuyunuz. İlaçlarınızı, doktorunuzun önerdiği şekilde, düzenli kullanmanız gerekmektedir. Travatan® göz damlasının kullanımı hakkında daha ayrıntılı bilgiyi, Travatan® kutusu içindeki prospektüste bulabilirsiniz.

DİĞER BİLGİLER

Her kullanımdan önce, şişenin cihazın içinde sıkıca yerleşmiş olduğunu kontrol ediniz.

Travatan® Eyot®, sadece, Travatan® göz damlası ile kullanılmalıdır. Bu cihaz, yardımcı basit bir damlatma tekniği sağlamaktadır.

Üretici:

Multidee Vianen

PO box 135, 4130 EC Vianen, Hollanda



İthalatçı Firma:

Alcon Laboratuvarları Ticaret A.Ş.

Acarlar İş Merkezi, Cumhuriyet Cad.

No: 10/5 C-Blok 34805 Beykoz, İstanbul

Travatan®, kayıtlı ticari markadır.

Eyot® kayıtlı ticari markadır.

Patentler askıdadır.

1020-0026-00 030505

TEMİZLEME ÖNERİLERİ

Şişeyi cihazın içinde bırakınız ve cihazı kuru temiz bir bezle siliniz.

Eğer gerekiyorsa, şişeyi cihazdan çıkararak, cihazı ılık su ile yıkayabilirsiniz. Temiz bir bezle kurulayınız. Sıcak ya da kaynayan su kullanmayınız. Cihazı bulaşık makinesinde yıkamayınız.

Travatan® şişesini Travatan® Eyot® içerisinde bırakabilirsiniz.

Travatan® Eyot®, geri dönüşümlü termoplastik sentetik malzemeden yapılmıştır. Ayna, metalik polyesterden yapılmıştır.